

**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)**Kód výrobku:** 4145 & 4146 včetně 4BC & G verze**Výrobek:** Sprchové křeslo Windsor / Paisley**SPECIFIKACE**Pro verzi 4145:

Celková hloubka (zvednuté opěrky  
nohou): 82 cm  
Celková hloubka (opěrky nohou dole):  
Celková hloubka: 105 cm  
Celková šířka: 60 cm  
Celková výška: 115 cm

Hloubka sedu: 43 cm  
Šířka sedu: 43 cm  
Výška sedu: 58 cm

Hmotnost výrobku: 20 kg  
Maximální hmotnost uživatele:  
160 kg



Zobrazený model: 4145G

**POPIS**

Sprchová křesla s plastovým potahem s ocelovým rámem s výklopnými područkami. Poskytují pohodlí díky polstrovanému sedáku a zádové opěrce. K dispozici s plně čalouněnými odnímatelnými sedadly nebo s čalouněnými sedadly s otvorem pro toaletní účely.

4145 je verze s vlastním pohonem pro použití jednotlivcem nebo s obsluhou a zahrnuje velká 60 cm zadní kolečka s brzdami.

4146 je pouze verze s obsluhou a zahrnuje dvě zadní kolečka, která mají standardní brzdu (čtyři brzděná kolečka jsou k dispozici u modelu /4BC).

Volitelně je k dispozici nočník/mísa pro toaletní účely, které se vejdu pod sedák u obou modelů.

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Křeslo je určeno k použití jako sedátko do sprchy pro usnadnění koupání. Může být také použito pro toaletní účely, pokud je k tomu vybaveno. Není určeno k použití jako invalidní vozík nebo k přepravě pacientů.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Područky a opěrky nohou lze snadno "vyklopit" pro snadné přesuny pouhým zatlačením nahoru směrem k zádové opěrce. Před přesunem z křesla by měla být opěrka nohou vyklopena nahoru, aby uživatel mohl položit nohy na podlahu. Posadte uživatele na křeslo a přesuňte jej do sprchy, pak proveďte běžnou hygienu. Vždy, když necháváte uživatele bez dozoru nebo při koupání, zabrzděte kolečka. Pokud je křeslo vybaveno brzdami na kolečkách, zatlačte na větší šedý jazýček na každém kolečku pro aktivaci brzdy, zatlačením na menší jazýček brzdu uvolníte. Pokud jsou osazena samohybnými koly, zatlačte černou páčku před kolečky na obou stranách dolů, abyste zabrzdili.

Pokud chcete použít pro toaletní účely, odstraňte čalouněný sedák (je-li ve výbavě), abyste odkryli toaletní / mycí otvor. Před použitím se ujistěte, že je pod křeslem umístěna mísa/nočník a zda je víko odstraněno. Nočník můžete být vysunout a zasunout z držáku pod sedákem v zadní části židle.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





### Pro verzi 4146:

Celková hloubka (zvednuté opěrky  
nohou): 58 cm  
Celková hloubka (opěrky nohou dole):  
81 cm  
Celková šířka: 52 cm  
Celková výška: 109 cm

Hloubka sedu: 43 cm  
Šířka sedu: 43 cm  
Výška sedu: 52 cm

Hmotnost výrobku: 13-14 kg  
Maximální hmotnost uživatele:  
160 kg



Zobrazený model: 4146G

Pokud máte s tímto výrobkem  
problémy, uveďte prosím sériové  
číslo, které naleznete na křesle.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití buďte opatrní, protože některé koupelnové  
výrobky mohou učinit povrchy kluzkými.  
Nikdy nepoužívejte na nerovném nebo šikmém  
povrchu.

Na křesle nebo opěrkách nohou nestůjte!  
Neponořujte křeslo do vody.

Křeslo není určeno k použití jako běžný invalidní vozík.  
Pacienti, kteří mají velmi nízkou hmotnost nebo trpí  
nekontrolovanými svalovými záškuby, by měli být při  
používání křesla pod dohledem, zejména pokud je  
odstraněna toaletní mísa.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím  
/ dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani  
drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od  
zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným  
kluzkým povrchem.

Kolečka a ložiska koleček by měla být chráněna před  
nečistotami, jako jsou vlasy atd., a měla by se mazat  
běžným způsobem pomocí lehce pronikajícího oleje,  
aby se minimalizoval průnik vody a zajistil se hladký  
chod. Pravidelně kontrolujte těsnost koleček, pokud se  
uvolní, okamžitě je znovu utáhněte.

### ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou  
12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato  
životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě  
používáte a řádně udržujete. Životnost se také může  
značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.  
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již  
není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který  
vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat,  
nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti  
Roma k recyklaci.

### PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s  
tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

