



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 4200, 4201 & 4206

Výrobek: Vanové sedátko



Zobrazený model: 4200

SPECIFIKACE

Celková hloubka: 43 cm

Celková šířka: 67 cm

Celková výška: 25 cm

Hmotnost výrobku: 5 kg

Max. hmotnost uživatele: 100 kg



Vlevo nahoře: 4200

Uprostřed nahoře: 4201

Vpravo nahoře: 4206

POPIS

Upevněné široké koupelňové sedátko, vhodné do většiny koupelen. Je k dispozici jako plastový rám s deskou (4200) nebo chromovaný rám s deskou (4201) nebo plastový rám s tvarovaným sedákem (4206). Dostupné také bez sedáku.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Poskytnout stabilní platformu, která pomůže uživateli při každodenním koupání.

NÁVOD K POUŽITÍ

Jednoduše spustíte sedátko do vany a ujistěte se, že vana plně podpírá boky sedátka. Pro vstup do vany použijte dostupné madlo.

1. Zapřete se pažemi i nohama a posuňte se dolů na vanové sedátko.
2. Posadte se na sedátko a umyjte se.
3. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní vytéct vodu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Buďte velmi opatrní při použití olejů a koupelových krémů, protože díky nim se může povrch vany stát kluzký. Na sedátku nestůjte! Seřizovací šrouby příliš neutahujte.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



| | |
|---|--|
| <p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na sedátku.</p> | <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u> Rám výrobku je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem</p> |
|---|--|