

NÁVOD K POUŽITÍ

Stabilizační hlezenní bandáž TALU medical

Datum poslední revize: 06/2017



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Bandáž je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Stabilizační hlezenní bandáž Talu medical je vysoce účinný lékařský výrobek odpovídající současným technickým poznatkům. Bandáž velmi dobře padne díky vytvarovaným výztuhám, má dva upínací pásy a pěnovou podložku pro bezpečnou a pohodlnou fixaci.

Bandáž se vyrábí v jednom univerzálním provedení pro použití na levé i pravé končetině.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je potřeba dbát na vhodnou velikost, aby nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Bandáž Talu medical se používá při potřhaných vazech, vymknutí, podvrtnutí a v rámci pooperační léčby.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Odlepte oba suché zipy a postavte nohu mezi boční díly bandáže.
2. Nastavte případně délku podložky nohy mezi díly na bočním suchém zipu.
3. Boční díly přiložte tak, aby kosti ležely ve výklencích bočních dílů.
4. Zatáhněte a zalepte nejdříve spodní suchý zip a pak horní.

5. Dávejte pozor na pevné uchycení, ale vyhněte se přílišnému přitažení, aby zůstala zachována cirkulace krve. Vše případně doupravte.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba bandáž používat pouze po dohodě s lékařem: změny kůže nebo záněty na příslušných místech, tvorba jizev, přecitlivělost při zahřátí, poruchy prokrvení nohou na chodidle/ bérce, poruchy mízního oběhu.

Další informace

- Bandáž by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Bandáž je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace bandáže s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte bandáž spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná bandáž může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je bandáž vyrobena.

Podmínky pro skladování

Bandáž skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte bandáž přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Bandáž čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Bandáž neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost	Kód produktu
----------	--------------

Univezální	27 213 10
------------	-----------

Textil: polyamid, lycra, elasthan

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz