



**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4962, 4964, 4966, 4972, 4974, 4976, 4982, 4984 & 4986

**Výrobek:** Zvyšovací nástavec na WC



**SPECIFIKACE**

Přípevnění vnitřními úchyty:

4962, 4964 & 4966

Přípevnění vnějšími úchyty:

4972, 4974 & 4976

4962, 4972 & 4982 Výška: 5 cm

4964, 4974 & 4984 Výška: 10 cm

4966, 4976 & 4986 Výška: 15 cm

Hmotnost výrobku: 1–1,9kg

Maximální hmotnost uživatele: 190 kg

**POPIS**

Zvyšovací nástavec na WC, který se montuje na toaletní místu po zvednutí prkénka i poklopu. Je k dostání ve třech rozdílných výškách a má buď vnitřní, nebo vnější fixační patky, jejichž utažením se bezpečně uchytlí. Utažení se provádí křídlovými maticemi nebo plastovými šrouby.

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Umožnit nebo pomoci zvýšit nezávislost při používání toalety, zejména pak kompenzace omezené pohyblivosti při sedání a zvedání se z toalety.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Zvyšovací nástavec by měl pohodlně dosedat na toaletní místu. Nesmí se pohybovat do stran.

Pokud chcete toaletní nástavec používat, zvedněte WC prkénko, umístěte nástavec na mísu a nastavte fixační patky tak, aby bezpečně dosedl. Utáhněte nejprve přední patku, až poté utahujte dvě postranní patky.

Před použitím se přesvědčte, zda je WC nástavec bezpečně na svém místě, a to dříve, než ho zatížíte.

Na nástavec si sedněte, jako byste měli normální WC prkénko.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Tyto nástavce nemontujte na WC prkénko.

**ČIŠTĚNÍ**

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. V případě potřeby můžete nástavec plně ponořit do vody a vyčistit jej. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy nástavec očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

**Roma Medical Aids Ltd.**

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



**ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU**

Výrobek je dodáván s 24 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

**PROBLÉMY/OTÁZKY**

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na nástavci.

Distributor pro Českou republiku:

**DMA PRAHA s.r.o.** | U Dálnice 207, 251 63 Kunice | [info@dmapraha.cz](mailto:info@dmapraha.cz) | +420 323 610 610 | [www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz)

**Roma Medical Aids Ltd.**

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

