

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA NA VANU

4100



CE

POUŽITÍ

Sedačky na vanu jsou součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňují pacientům osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde k osobní hygieně není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavenou vanu.

POPIS

Sedačka je vyrobena z odolného plastu vysoké pevnosti. Sedačka je nastavitelná dle šířky vany pomocí bočních čtyř dorazových opěrek a je vybavena bezpečnostním madlem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním sedačky si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je sedačka suchá a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 190 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 120 kg.

Při upevňování sedačky k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. sedačku, madlo s dvěma šrouby a 4 boční vymežovací opěrky s protilehlými plastovými šrouby.

SLOŽENÍ A INSTALACE SEDAČKY

Vyjměte z krabice všechny části sedačky. Pomocí přiložených plastových šroubů připevněte v případě potřeby k sedačce madlo. Stejným způsobem, tedy pomocí plastových šroubu (A), připevněte k sedačce boční dorazové opěrky (B). Prostrčte šroub skrz sedačku a po směru hodinových ručiček našroubujte dorazovou opěrku. Tento postup opakujte u všech čtyř opěrek. Všechny opěrky lze obousměrně posunout, nastavte je tedy dle vnitřní šířky vany a tuto polohu utažením zafixujte. Sedačku pak nasadte na vanu nejprve na jedné straně a následně na straně protilehlé. Zkontrolujte, zda je sedačka pevně ukotvena a nehýbe se ani po zatížení. Pokud tomu tak není nebo naopak nelze-li sedačku nasadit, je zapotřebí upravit polohu opěrek a nasazení opakovat. Nyní je sedačka připravena k použití.

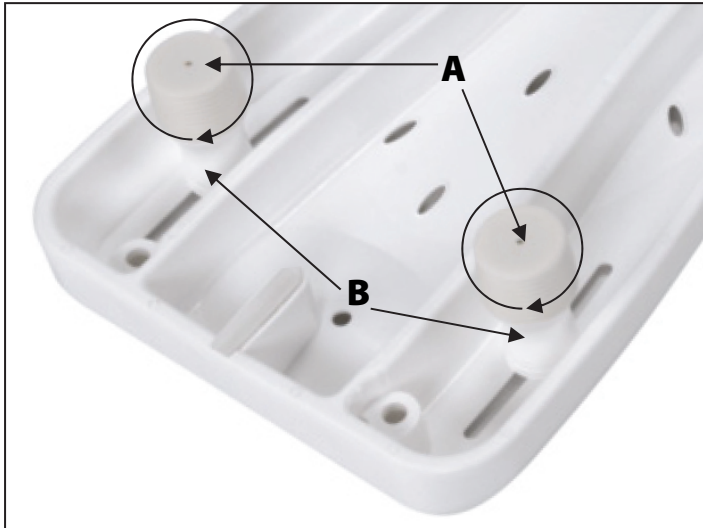

Přípevnění vymežovacích opěrek

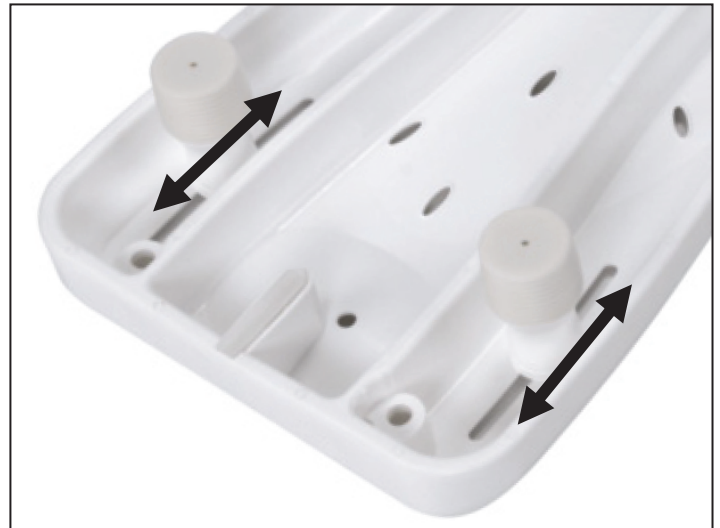

Nastavení vymežovacích opěrek

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.