

# Návod k použití, verze 12/2015

etac®

80210040 Madlo rovné ETAC Handy 30 cm

80210042 Madlo rovné ETAC Handy 40 cm

80210044 Madlo rovné ETAC Handy 60 cm

80210046 Madlo zalomené ETAC Handy 40 cm



Praktická bezpečnostní madla určená pro podporu stability při sedání si, při vstávání ze sedu, během sezení nebo při chůzi. Madla Etac Handy mají oválnou rukojeť s šedými kroužky, které poskytují bezpečné a pohodlné uchopení. Madla nikdy nestudí při úchopu, jsou zcela bez ostrých hran a upevňovací šrouby jsou skryté za šedými kryty.

## Technické parametry:

- materiál: polypropylen, hliníkové vyztužení
- protiskuzový bezpečnostní žebrovaný povrch („gumové kroužky“)
- délka: 30, 40, 60 cm
- nosnost: 160 kg

## Kotvení na zeď:

- 1) na zeď se připevní kolejnice pomocí 4 vrtů č. 10 s kulatou hlavičkou (rozměr 5x50mm) a hmoždinek (madlo lze uchytit na většinu pevných zdí, přičemž vhodnost nelze s určitostí potvrdit bez znalosti materiálu, na který má být madlo uchyceno)
- 2) koncové části madla se umístí do kolejnic a zatlačením směrem dolů se zacvaknou
- 3) vrtuty a další kotvicí materiál není součástí balení z důvodu neznalosti materiálu, na který má být madlo uchyceno (v případě pochybností je třeba se poradit s řemeslníkem)

## Čištění:

Čištění provádějte pomocí jakýchkoli neagresivních detergentů (ideálně hadříkem s jarovou/mýdlovou vodou).

## Pozice použití:



Vertikální pozice



Horizontální pozice



Zalomené provedení

## VÝROBCE

Etac Supply Center AB  
Langgatan 12  
Box 203, SE-334 24 Anderstorp  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

## DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 – Spořilov  
Tel.: +420 272 761 102  
[meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

