

Etac My-Loo

Návod k použití



03/2018



VYROBCE

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
Box 203, 334 24 Anderstorp Sweden
tel. +46 371 58 73 00
www.etac.com



DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: +420 272 761 102
www.meyra.cz



Obecné

Etac My-Loo s úchytkami je toaletní nástavec pro použití na toaletní míse. Byl vyvinut s cílem usnadnit používání toalety osobám s omezenou pohyblivostí a těm, kteří potřebují vyvýšené toaletní sedátko.

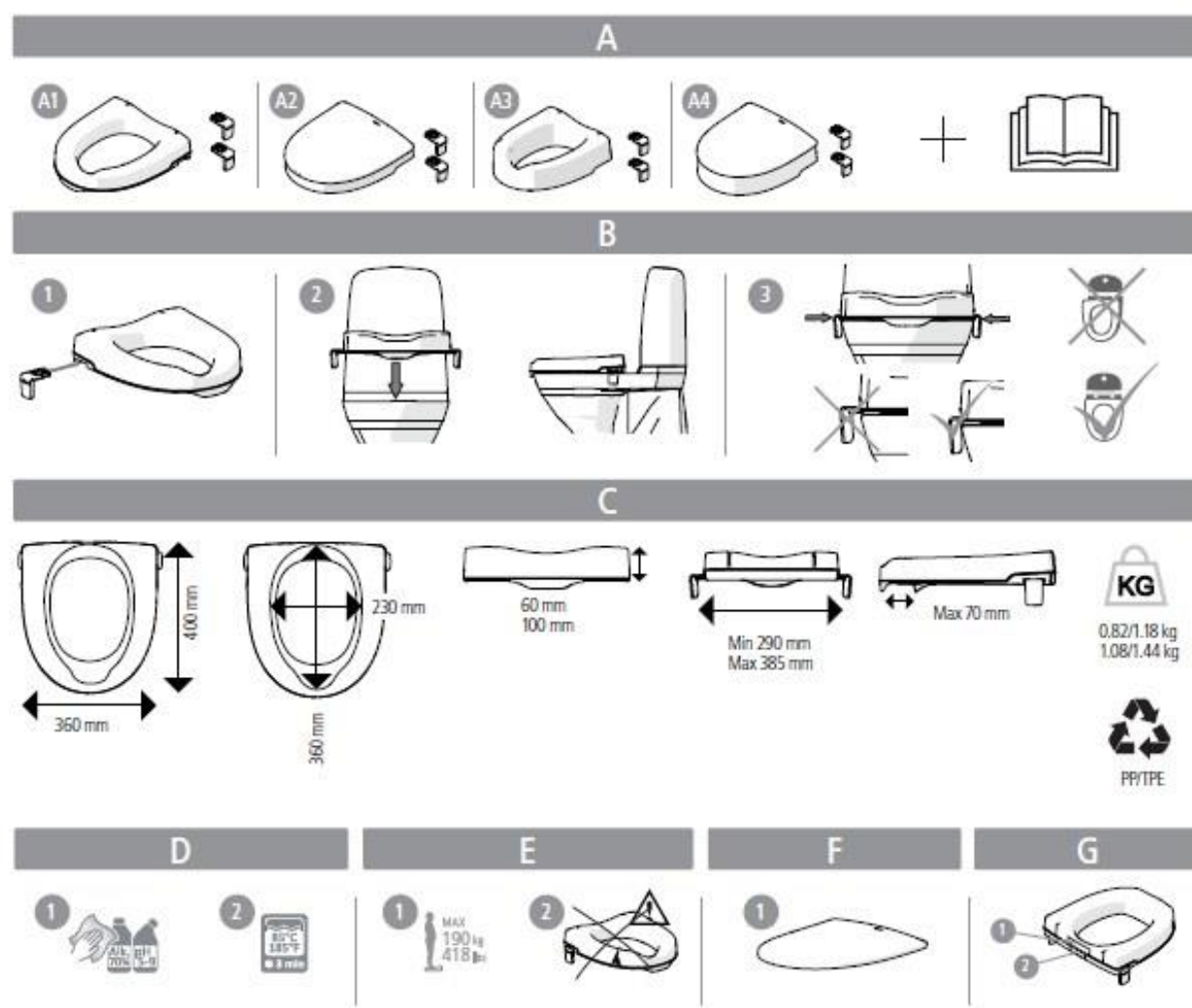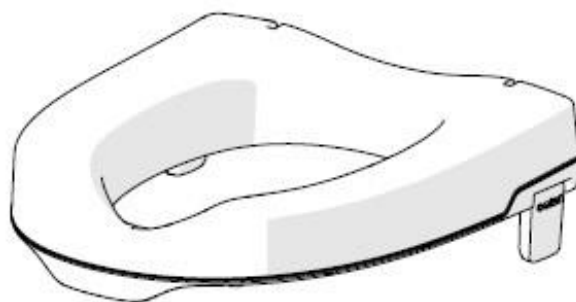

Použití

Toaletní nástavec Etac My-Loo s úchyty usnadňuje použití toalety osobám s omezenou pohyblivostí. Instalujte rovnou na záchodovou mísu, ze které buď úplně odstraníte toaletní prkénko, nebo ho vyklopíte. Toaletní nástavec Etac My-Loo je určen pro domácí použití. Výrobek Etac My-Loo smí být použit pouze dle výše vyobrazených pokynů.

Kontraindikace

Osoby s těžkými poruchami stability (v tomto případě doporučujeme nástavec s madly).

Obsah dodávky

Viz obrázek A

- A1 – toaletní nástavec My-Loo 6 cm, bez víka
- A2 – toaletní nástavec My-Loo 6 cm, s víkem
- A3 – toaletní nástavec My-Loo 10 cm, bez víka
- A4 – toaletní nástavec My-Loo 10 cm, s víkem
- Návod k použití

Instalace

Viz obrázek B

1. Nasadíte držáky na nástavec do určených míst.
2. Nasadíte nástavec na toaletní mísu.
3. Držáky zatlačíte z boku proti toaletní míse, abyste zajistili umístění nástavce. Ujistěte se, že jste umístili nástavec na střed toaletní mísy.

Rozměry a jiná technická data

Viz obrázek C

Použité materiály jsou odolné proti korozi.

Údržba, čištění a dezinfekce

Viz obrázek D

1. Výrobek čistíte/dezinfikujete pomocí běžných, neabrazivních prostředků s pH mezi 5 a 9. Opláchněte a usušte. Výrobek nevyžaduje žádnou další zvláštní údržbu. Lze dezinfikovat 70% dezinfekčním roztokem.
 2. Výrobek je možné bezpečně čistit ve sterilizátoru na 85°C po dobu 3 minut. To platí při opětovném uvedení do provozu.
- Použité materiály jsou odolné vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům.

Bezpečnost

Viz obrázek E

1. Maximální hmotnost uživatele 190 kg.
2. Poškozené nebo chybně nainstalované výrobky nesmějí být používány!

Záruka

Poskytujeme záruku 5 let na materiál a výrobní vady. Doba použitelnosti: 5 let.

Příslušenství

Viz obrázek F

1. Víko

Umístění štítku

Viz obrázek G

1. Výrobní štítek
2. Označení výrobku