


Etac Swift Kommod



Manuál

Datum vydání 16-02-02

A

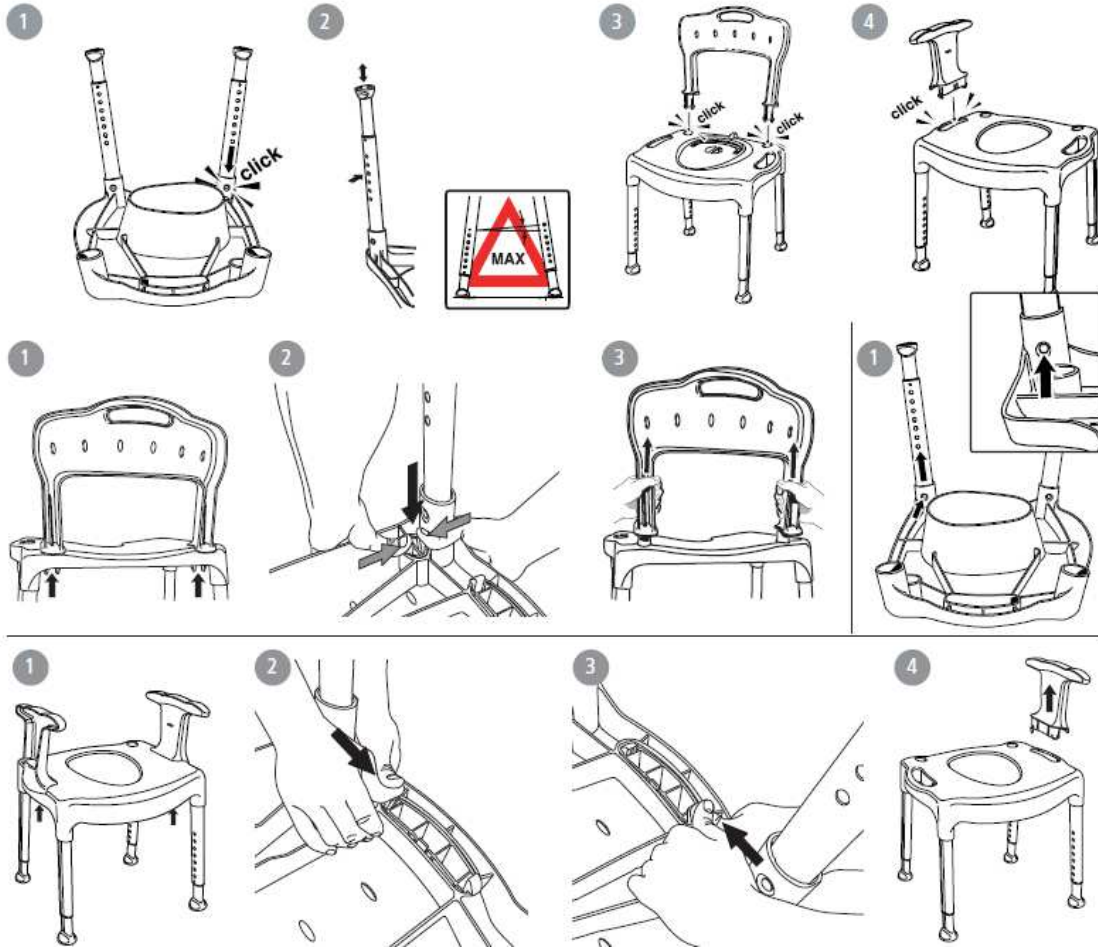


B



C

Etac Swift Commode	210 mm	450 mm	540 mm	800-950 mm	530-550 mm	540 x 410 mm	420-570 mm	5,4 kg

D

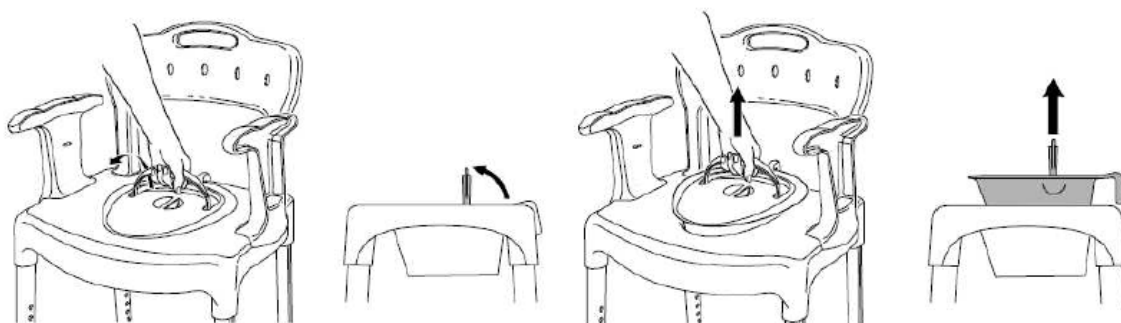

Čeština

Použití

Swift Kommod je pohodlné přenosné toaletní a koupelňové křeslo, které usnadňuje každodenní činnosti včetně používání toalety. Křeslo uživateli nabízí nejen zvýšení bezpečnosti, ale i zachování jisté míry samostatnosti.

Pevné toaletní a koupelňové křeslo Swift Kommod nabízí uživateli stabilní polohu v potřebné výšce nad toaletou, ve sprše nebo kdekoli jinde.

Popis

Křeslo Swift Kommod je určeno k použití ve sprše, koupelně nebo na toaletě. Má pevnou stabilní konstrukci a je navrženo pro přizpůsobení se jakémukoli nerovnému povrchu. Křeslo je vybaveno výškově nastavitelnými nohama, které se snadno nasazují. Správná výška křesla a použití područek usnadní uživateli vstávání i sedání si.

Gumové nástavce nohou a protiskluzový vzor sedadla jsou bezpečnostními a stabilizačními prvky, díky kterým se uživatel může cítit zcela bezpečně. Křeslo Swift Kommod může být pomocí doplňků upraveno.

Koupelňové a toaletní křeslo Swift Kommod bylo testováno a je v souladu s požadavky norem EN ISO 10993-1, ČSN EN 12182.

Instalace a použití..... viz obr. A

Údržba a bezpečnost..... viz obr. B

Varování

Poškozený produkt nesmí být používán.

Rozdíl v nastavení výšky nesmí být větší než 1 otvor.

Při vstávání či sedání si se vždy opírejte o obě područky.
Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

Čištění

Produkt čistěte pouze prostředky bez obsahu rozpouštědel s pH 5-9 nebo 70 % desinfekčním prostředkem. Vždy dodržujte doporučení výrobce na obalu prostředku.
Teplná dekontaminace smí být prováděna při max. 85°C po dobu 3 minut.

Záruka

Záruka na materiál a výrobní vady je poskytována po dobu 5 let. V případě dotazů či reklamací se, prosím, obraťte na prodejce.

Technické údaje..... viz obr. C

Použití toaletní nádoby..... viz obr. D

Příslušenství ve standardní sestavě

1. Toaletní nádoba včetně víka
2. Zádová opěra
3. Polstrování sedátka
4. Polstrování zádové opěry
5. Područky

Volitelné příslušenství

1. Držák na mýdlo
2. Držák sprchy

VÝROBCE

Etac Supply Center AB
Langatan 12
Box 203, 334 24 Anderstorp Sweden
Tel.: +46 371 58 73 00
www.etac.com

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
Email: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

