

Toaletní nástavec Molett

3011522 / 3011532

Návod k použití

Datum poslední revize: 02/2018



ÚVOD

Toaletní nástavec Molett je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnici 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Tento návod k použití je navržen tak, aby vám usnadnil manipulaci s produktem, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání a zabránilo se nehodám.

Upozornění:

- ! Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte celý návod k použití.

POPIS

Plastový toaletní nástavec Molett je navržen pro snadné uchycení na většinu standardních keramických toaletních mís pro zvýšení o 10 cm. Nástavec je dostupný v provedení s víkem a bez víka. Uchycení je zajištěno bočními nastavitelnými šrouby. Spodní část je vyplněna pro snadné čištění.



POUŽITÍ

Toaletní nástavec Molett slouží jako pomůcka při vstávání ze sedu a sedání si na běžná WC.

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ

Zcela vybalte produkt a zkontrolujte dodávku z pohledu kompletnosti a poškození, které mohlo vzniknout během přepravy. Pokud zjistíte, že produkt nese známky poškození, prosím:

1. informujte o tom dopravce,
2. trvejte na zaznamenání poškození,
3. neprodleně informujte prodejce.

ROZSAH DODÁVKY

Toaletní nástavec Molett

Model: 3011522

1x Toaletní nástavec [1]

Model: 3011532

1x Toaletní nástavec s víkem [2]

1x Návod k použití



MONTÁŽ

Toaletní nástavec je dodáván částečně sestavený. Příložené svorky musí být sestaveny.

☞ Sestavení toaletního nástavce Molett by mělo být provedeno technikem prodejce.

1. Připojte upevňovací šroub a držák k sobě [3] + [4].
2. Zasuňte upevňovací šroub a držák do zásuvky [5].
3. Otočte upevňovacím šroubem o několik otáček [6].
4. Odstraňte standardní prkénko s víkem a umístěte toaletní nástavec na střed záchodové mísy.
5. Upevněte nástavec ručně pomocí upevňovacích šroubů na bocích.

Upozornění:

- ! Nakonec zkontrolujte, zda všechny upevňovací šrouby sedí pevně.
- ☞ Pokud je to třeba, šrouby dotáhněte.

Toaletní nástavec je připravený k použití.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nesedejte / nestoupejte na víko.
- Podepírejte se rovnoměrně oběma rukama na okraji záchodového sedátka.
- Ujistěte se, že šrouby jsou ručně rovnoměrně utaženy.
- Sledujte, zda upevňovací šrouby poskytují bezpečné uchycení k záchodové míse. Všimněte si, že toaletní nástavec není kompletně přišroubovaný na toaletu, ale jen uchycený.
- Poškozené díly ihned nahraďte novými u prodejce.
- Před každým použitím se ujistěte, že protiskluzové části upevňovacích svorek jsou v bezvadném stavu.
- Před každým použitím se ujistěte, že víko nemůže samovolně spadnout. Nebezpečí úrazu!
- Povrch nástavce se může extrémně zahřát při jeho vystavení přímému slunečnímu záření nebo sálavému světlu. Kontakt s holou kůží může mít za následek zranění!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokyny pro údržbu

I přes použití kvalitních robustních materiálů podléhají nástavec i víko opotřebení. Z tohoto důvodu doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu stavu servisním technikem prodejce v intervalu 6 měsíců. Přitom se ujistěte, že protiskluzové prvky (připojovací svorky) řádně sedí!

Čištění

- Pro čištění používejte vodu s mýdlem nebo jiné prostředky na vodní bázi prosté silikonu.
- Při čištění dodržujte údaje uvedené na obalu prostředku.
 - Čistící prostředek by v žádném případě neměl mít pH nižší než 6 (nejlépe neutrální).
 - Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, např. rozpouštědla nebo hrubé kartáče.
 - Toaletní nástavec není vhodný pro čištění v myčce.
- Nástavec po čištění opláchněte čistou vodou a usušte.

Desinfekce

- Pokud je nástavec používán více než jedním uživatelem (např. v domově s pečovatelskou službou), je povinné používání běžně dostupných desinfekčních přípravků.
- Nástavec před desinfekcí vyčistěte.
 - Desinfekce sprejovým čističem nebo vlhčeným ubrouskem je povolena pouze s obsahem akreditovaných desinfekčních látek.
 - Při desinfekci dodržujte údaje uvedené na obalu prostředku.
 - Pozor – při použití některých dezinfekčních prostředků může být povrch nástavce ovlivněn takovým způsobem, že bude ovlivněna dlouhodobá funkčnost dílů.

Opětovné použití

Před opětovným použitím nástavec podrobte kompletní kontrole stavu.

Upozornění:

Hygienická opatření nezbytná před opětovným použitím musí být provedena v souladu s validovanými hygienickými postupy.

Opravy

Na produkt je standardně poskytována záruka 24 měsíců. Opravy nikdy neprovádějte samostatně. Využívejte služby u svého prodejce. Pro opravu je povoleno použití výhradně originálních náhradních dílů.

Likvidace

O pokynech pro nakládání s odpadem se informujte na místním obecním úřadě.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------|------------------|
| Model: | 3011522/3011532 |
| Materiál: | plast |
| Barva: | bílá |
| Celková výška: | 16 cm |
| Zvýšení sedu: | 10 cm |
| Šířka bez šroubů: | 38 cm |
| Hloubka: | 43 cm |
| Otevřené rozměry: | 215 x 270 mm |
| Upínací šířka: | 325–405 mm |
| Max. vertikální nosnost: | 150 kg |
| Hmotnost: | přibližně 1/3 kg |

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz