



**KOVAL d.o.o.**  
Loka pri Žusmu 9  
3223 Loka pri Žusmu  
SLOVENIJA  
Tel.: (03) 747 19 00  
Fax: (03) 747 19 18  
E-mail: [koval@koval.si](mailto:koval@koval.si)  
[www.koval.si](http://www.koval.si)



## NÁVOD K POUŽITÍ

### ELEKTRICKÉ CHODÍTKO

Zb. č. 11992100



#### Informace před použitím přípravku / fungování zdravotních výrobků

Vážení kupující,

blahopřejeme vám k zakoupení zdravotnického výrobku Koval. Vezměte prosím na vědomí následující body:

1. Přečtěte si pozorně příložený návod k použití.
2. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.
3. Výrobek smí ovládat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním.
4. Údržbu, jakož i bezpečnostní a technickou kontrolu smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.
5. Montáž, rozšíření, revizi nebo opravy smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.

V případě jakýchkoli technických zásahů do výrobku ve smyslu doplnění nebo revizí, které nevykonává společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval, se ruší jakákoliv záruka ve vztahu k těmto revizím, jakož i ve vztahu k výrobku a jeho funkcím.

#### Preventivní opatření

Přečtěte si pozorně příložený návod k použití. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.

**Je třeba vzít v úvahu poznámky uvedené pod nadpisem „VAROVÁNÍ“.**

### ***Účel použití***

Toto chodítka se používá jako podpora pacientů při chůzi.

### **Předpisy a normy**

Při používání chodítka se musí dodržovat veškeré platné předpisy a normy, které se na takovéto použití vztahují.

### **Značka CE**

Značka CE odkazuje na směrnici 93/42 / EHS pro zdravotní výrobky.

### ***Odpovědnost a záruka***

Výrobce produktu odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku, pouze pokud:

- A. se výrobek používá výhradně ke stanovenému účelu použití.
- B. se provádí pravidelné kontroly funkčnosti.

### **Poškození při přepravě**

Při dodání zkontrolujte, zda není výrobek nebo obal jakýmkoli způsobem poškozen. V této souvislosti pamatujte na lhůty pro ohlášení škod: je stanovena 2denní lhůta pro viditelné škody a 7denní lhůta pro skrytá poškození.

### **Výrobní číslo**

Typové označení chodítka Koval se nachází na spodním rámu. V případě dotazů uveďte sériové číslo chodítka.


## Zobrazení produktu

Obrázek 1: Zobrazení tlačítka pro nastavení výšky




Dvě tlačítka - nahoru a dolů

Obrázek 2:  
Zobrazení chodítka s rukojeťmi

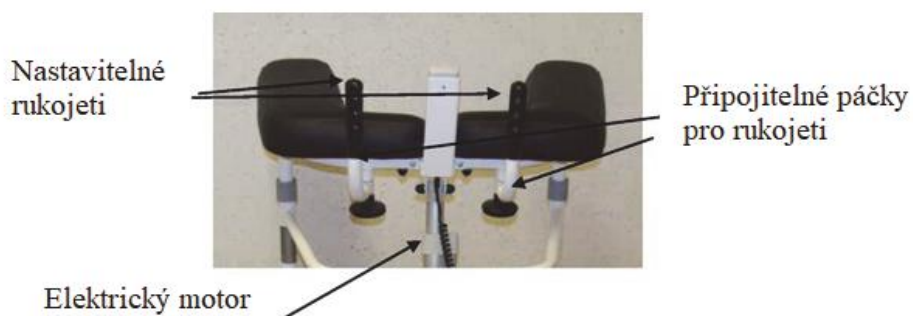

Obrázek 3: baterie

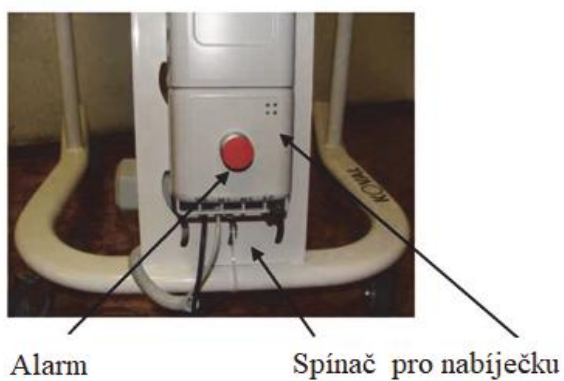

Na ovládací skříni baterie jsou dva LED indikátory. Zelený a oranžový. Pokud svítí zelené světlo, baterie je nabitá a pokud svítí oranžové světlo, je třeba baterii dobít. Závěrečný signál je zvukový, opakované pípání. Jakmile zazní tento zvuk, je třeba baterii okamžitě dobít.

Obrázek 4



AC / DC nabíječka a propojovací

Obrázek 5:



Kolečka 0,75 mm (2 x bez, 2 x s brzdami)

### Technické informace

Šířka:	max. 82 (64) cm
Délka:	max. 74 cm 90-
Nastavení výšky:	120 cm cca 23,5
Hmotnost bez obalu:	kg
Baterie:	DC 24 V /
Nabíječka:	4,5Ah AC 230V
Ochrana:	IPX4

### Ovládání výrobku

Chodítko je připraven k použití ihned po vyjmutí obalu a nastavení rukojetí.

**Nastavení výšky pomocí zabudovaného elektromotoru**

Horní část chodítka lze nastavit pomocí stisknutím tlačítka s šipkou nahoru a dolů (obrázek 1).

### **VAROVÁNÍ**

**Zabraňte tomu, aby se baterie zcela vybila.**

**Používejte pouze uvnitř.**

### **Řešení problémů**

**Nelze nastavit výšku chodítka, nebo se chodítko nepohybuje:**

#### **MOŽNÉ PŘÍČINY:**

Baterie je vybitá.

Zadní kola jsou zablokována.

#### **ŘEŠENÍ:**

Nabijte baterii.

Uvolněte brzdy.

### **Údržba**

Výrobek by se měl otírat prachovkou. Přibližně každé dva měsíce by se měl rám vyleštit leštící pastou. Loketní opěrky jsou vyrobeny z materiálu, který se snadno udržuje - kompozitní kůže, testovaná podle DIN 54020. Tento potah lze otřít suchým nebo vlhkým hadříkem; v případě potřeby lze také použít prací prostředek na praní citlivého prádla, ale měl by se ihned po použití otřít (skvrny odstraňte co nejdříve, aby nedošlo k jejich absorpci do materiálu). Nakonec materiál očistěte teplou a čistou vodou.

Odolné nečistoty lze odstranit hadříkem navlhčeným v alkoholu (hadřík by neměl být mokrá). Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují tuky nebo oleje. Podobně by se neměla používat rozpouštědla (jako aceton) nebo drsné čisticí prostředky.

### **VAROVÁNÍ**

**Područky nejsou odolné proti suchému čištění.**

### **Bezpečnostní a technická kontrola**

V souladu se »Zákonem o zdravotních výrobcích« se musí bezpečnostní a technická kontrola provádět jednou ročně.

### **Opravy, servis a náhradní díly**

KOVAL, d.o.o.

Loka pri Žusmu 9

SI-3223 Loka pri Žusmu

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na:

Tel.: +386-3 747 1900

Fax: +386-3 747 1918 prodaja@koyal.si