

# NÁVOD K POUŽITÍ

PODPĚRA NA WC PŘENOSNÁ

# 4321 EX



## POUŽITÍ

Podpěra na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít standardní mísu WC. Podpěra usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminuje možné riziko pádu a výrazným způsobem zvyšuje jeho soběstačnost. Využití má zejména tam, kde stavební úpravy neumožňují instalaci madel.

## POPIS

Šířkově i výškově nastavitelný ocelový rám podpěry je doplněn vyměkčenými područkami. Výškově nastavitelné nohy jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podpěry si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podpěry konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

## ÚDRŽBA

Podpěru lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## NASTAVENÍ VÝŠKY A ŠÍŘKY PODPĚRY:

Pro nastavení výšky podpěry vytáhněte aretační „E“ pojistku (A), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku podpěry. Pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

Pro nastavení šířky podpěry vytáhněte aretační „E“ pojistky (B), tahem/tlakem nastavte požadovanou šířku podpěry a pojistky zasuňte zpět.

