

NÁVOD K POUŽITÍ

MECHANICKÝ TRANSPORTNÍ VOZÍK

512 JBS



CE

POUŽITÍ

Transportní vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

POPIS

Skládací rám vozíku je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Vozík je vybaven bovdenovými brzdami pro doprovod s možností aretace, nastavitelnými otočnými područkami, sklopnou stupačkou a bezpečnostním pásem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte vozík k sezení.

Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost je 80 kg (viz štítek na produktu).

Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li vozík v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání vozíku musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Stupačka je určena pro pouze oporu dolních končetin.

Nikdy na stupačku nestoupejte a nepřenášejte váhu celého těla.

Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Vozík nepoužívejte na kluzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

ÚDRŽBA VOZÍKU

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přešetřit vhodným leštícím prostředkem. Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, područek, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. V případě důkladnější kontroly technického stavu nebo opravy, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy. Popsanou kontrolu doporučujeme provádět každý měsíc.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.


ROZLOŽENÍ VOZÍKU

Vybalte vozík z krabice a otevřete transportní tašku.


Vozík položte na podlahu, přidržte přední část sedačky a zvedněte zádovou opěrkou, dokud se aretační tyčka nezaklapne do zámků.




2-1

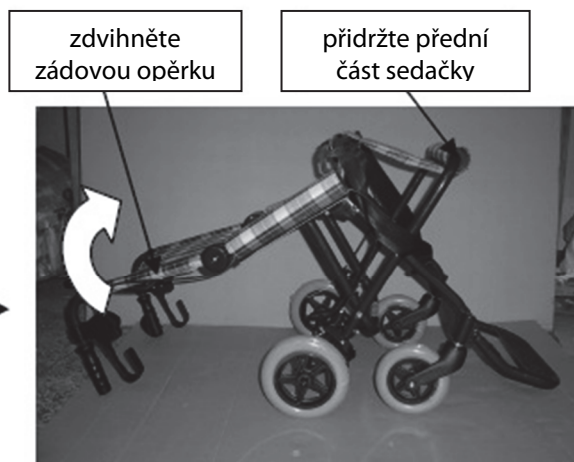

2-2

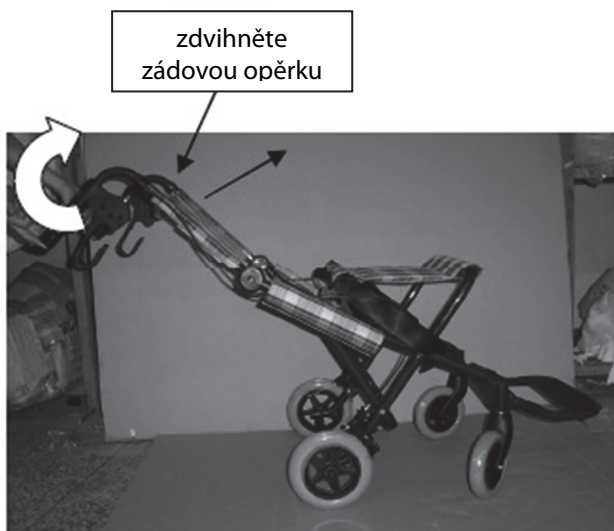

2-2

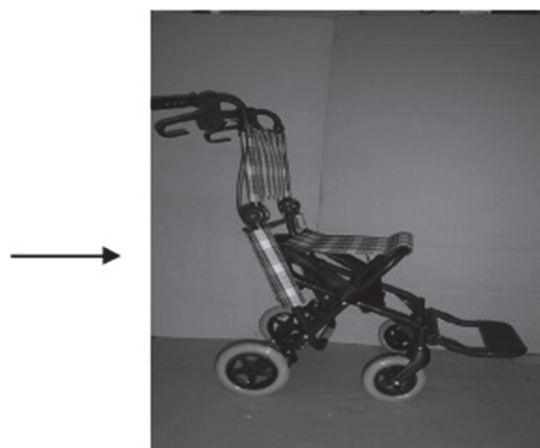


2-4



2-5


aretační tyčka musí být zaklapnuta do zámků

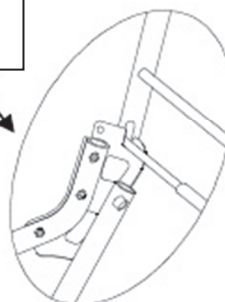


Upozornění: Před použitím vozíku se vždy přesvědčte, že je aretační pojistka v zámcích.

NASTAVENÍ PODRUČEK

Požadovanou výšku nastavte otáčením područky proti směru hodinových ručiček.

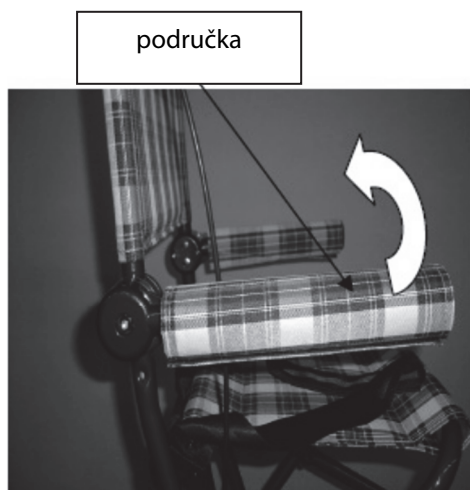


správně (nahoru)

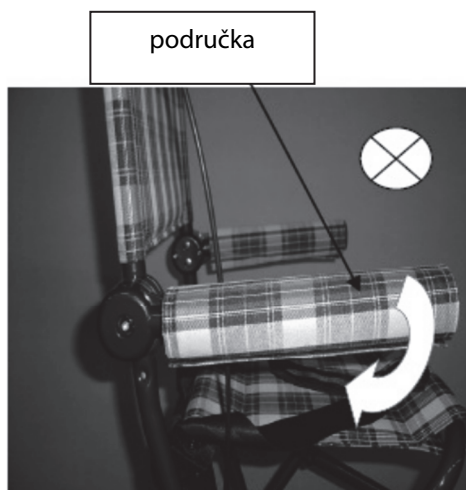


špatně (dolů)

BRZDY

Vozík přibrzdíte stlačením brzdových pák směrem nahoru.

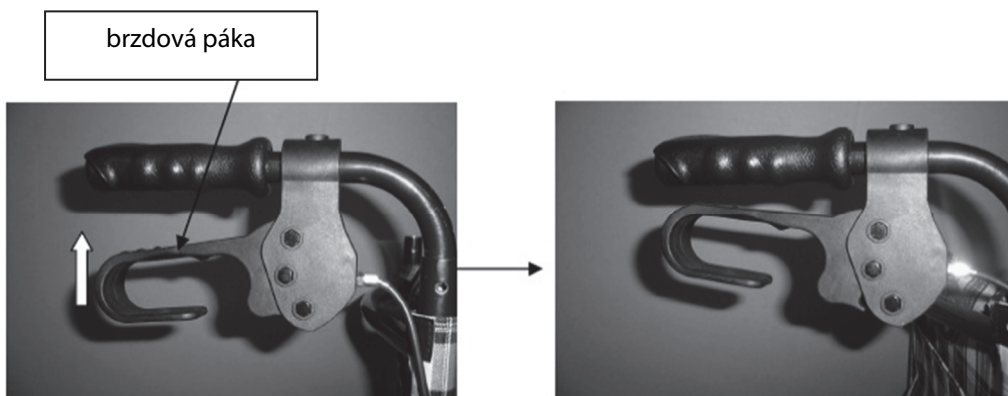


Při parkování vozík zabrzdíte pohybem brzdové páky směrem dolů. Tato pozice zůstane zaaretována. K odblokování stiskněte páku směrem nahoru.

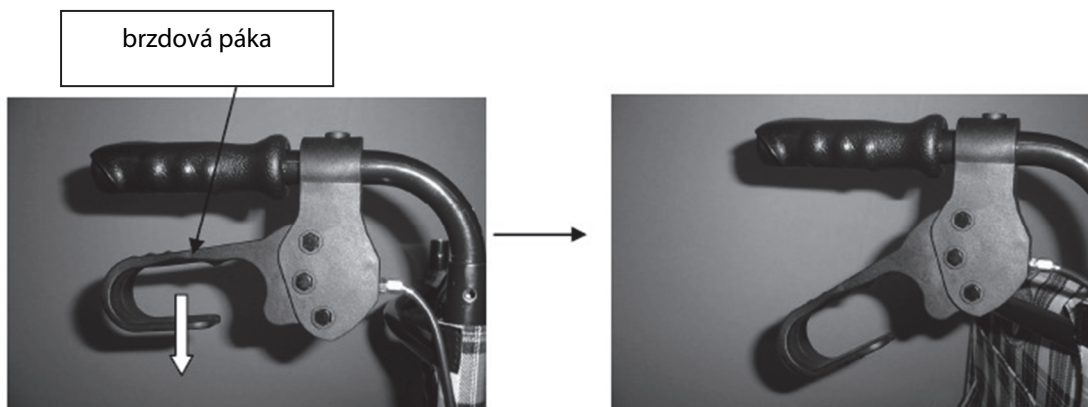

STUPAČKA

Podle potřeby a využití můžete stupačku sklopit nebo odklopit.

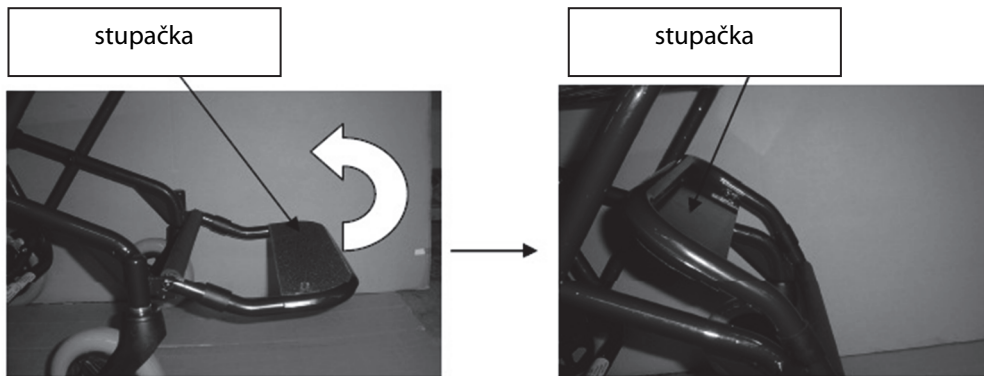

Upozornění: Při nasedání nebo vysedání z vozíku na stupačku nikdy nestoupejte, vozík by se mohl převrátit!

