

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁJEZDOVÁ SKLÁDACÍ RAMPA

MR 607



POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší schodišťové nebo jiné výškové bariéry a usnadňují tak např. naložení mechanického a elektrického vozíku nebo skútru do auta.

POPIS

Lehká a skladná rozšířená teleskopická dvoudílná spojená duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a zkosenými konci. Madlo umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Nepřekračujte maximální nosnost rampy 270 kg.

ROZLOŽENÍ A INSTALACE RAMPY:

Rozložené rampy umístěte zkosenou částí nahoru a ujistěte se, že jsou položeny stabilně. Sklon rampy by neměl z bezpečnostních důvodů přesáhnout poměr 1:8.

ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.