

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO VANY

559 A, B, C, D



CE

POUŽITÍ

Sedačky do vany jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminují možné riziko pádu při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a výrazným způsobem zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS

Vylehčená plastová konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a instalaci do vany. Je vybavena sedací plochou s otvory pro odtok vody. Ve spodní části je konstrukce sedačky doplněna čtyřmi protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Sedačka se vyrábí ve čtyřech různých výškových variantách (A, B, C, D).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte její maximální nosnost.


Při upevňování sedačky do vany postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Před každým použitím se přesvědčte, zda je sedačka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

INSTALACE SEDAČKY

Sedačku přiložte na zvolené místo ve vaně a tlakem prostřednictvím přísavek (1) zajistěte její polohu a stabilitu. K uvolnění a zvednutí sedačky jsou jednotlivé přísavky opatřeny táhlem (2), po jehož odtažení přísavku uvolníte.

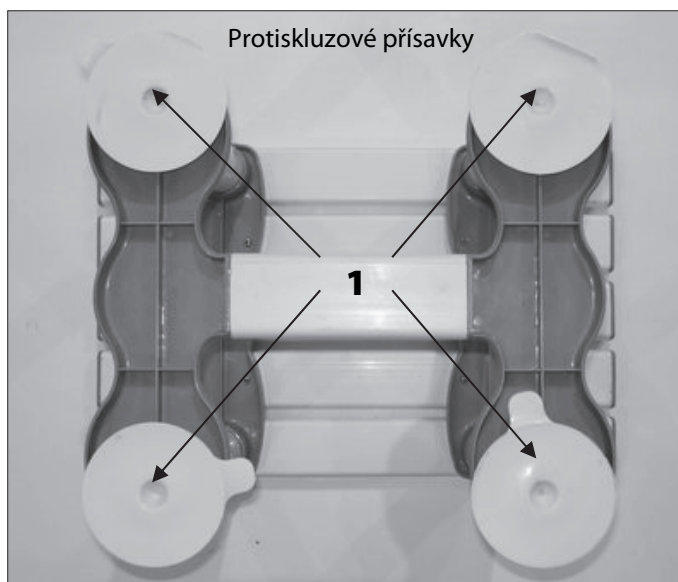

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce.