

Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 4319, 4320 a 4321

Výrobek: WC podpěra



SPECIFIKACE

4319 - hliníkový rám

4320 - ocelový rám potažený
plastem

4321 - ocelový rám potažený
plastem s nastavením šířky

4322

Dostupné varianty (možnost dodat
i více než jednou variantu):

F - vybavená nohami pro

upevnění k podlaze

EX - vybavená výsuvnými nohami

N - užší šířka

HD - těžká

Pokud máte s tímto
výrobek problémy, uveďte
prosím sériové číslo, které
naleznete na výrobku.



Zobrazený model: 4319EX

Celková hloubka: 45 cm

Celková šířka: 59 cm

Šířka mezi loketními opěrkami:

48 cm

Celková výška: 67-82 cm

Hmotnost výrobku: 2 kg

Max. hmotnost uživatele: 127 kg

POPIS

Robustní rám, který se upevní kolem domácí
toalety a který uživateli může pomoci sedět na
záchodě nebo se z něj zvedat. Dvě přední lišty
slouží jako opory zadní části nohou uživatele a
čalouněné opěrky podpírají uživatele na
záchodě, což také zvyšuje pohodlí uživatele.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Pomáhat a podpírat uživatele při sedání a
vstávání z toalety pomocí poloprůhledné WC
podpěry.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před instalací WC podpěry na místo nastavte,
pokud možno, správné rozměry.

Pokud je vybaveno teleskopickými nohami, lze
je nastavovat individuálně tak, že odeberete
sponu ve tvaru e, posunete prodlužovací
nástavec do nové polohy a následně vložíte
sponu do příslušného otvoru. Opakujte pro
všechny zbylé nohy tak, aby byly všechny stejně
dlouhé. Nohy by měly být nastaveny tak, aby
byly loketní opěrky v pohodlné výšce.

U modelu 4321 lze šířku rámu nastavovat
individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru e
z vodorovné lišty, posunete prodlužovací
nástavec do nové polohy a následně vložíte
sponu do příslušného otvoru.

Po dokončení úprav položte rám na toaletu.
Vodorovná lišta musí být vpředu a ujistěte se, že
je zařízení pevně usazeno na podlaze nebo
pevně připevněno k podlaze.

Pokud je podpěra vybavena nohami pro
upevnění k podlaze, má každá noha desku se
dvěma otvory, kterou lze trvale přišroubovat k
podlaze. Toto zařízení musí k podlaze připevnit
kvalifikovaná osoba. Nemůžeme doporučit, jaké
upevnění na podlahu použít, protože to bude
záviset na konstrukci vaší podlahy, vyžádejte si
radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.



Zobrazený model: 4320EX

Celková hloubka: 48 cm

Celková šířka: 60 cm

Šířka mezi loketními opěrkami:
51 cm

Celková výška: 67-82 cm

Hmotnost výrobku: 4 kg

Max. hmotnost uživatele: 160
kg



Zobrazený model: 4321EX

Celková hloubka: 48 cm

Celková šířka: 62-75 cm

Šířka mezi loketními opěrkami:
51-64 cm

Celková výška: 66-81 cm

Hmotnost výrobku: 6 kg

Max. hmotnost uživatele: 140 kg

Poté, co je zařízení na svém místě, když se chystáte posadit na toaletu, přistupte k záchodové míse, otočte se a najděte zadní částí nohou vodorovnou lištu. Obě ruce položte na loketní opěrky a opatrně se posadte na toaletní desku. Když se chcete postavit, položte obě ruce na loketní opěrky a použijte je jako oporu při zvedání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na pomůcce nestůjte! Na rám nesedejte. Nepoužívejte jako pomůcku pro chůzi.

Pokud je podpěra vybavena nastavitelnými nohami, ujistěte se, že byly všechny nohy nastaveny na stejnou výšku.

Ujistěte se, že je uživatel oprávněn používat výrobek.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY / OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.