

# NÁVOD K POUŽITÍ

DŘEVĚNÉ KLOZETOVÉ KŘESLO

# ASTRA



CE

## **POUŽITÍ**

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

## **POPIS**

Rám křesla je vyroben ze dřeva, doplněn plastovým toaletním sedátkem a plastovou toaletní nádobou s víkem ACC/5H. Pro zvýšení komfortu uživatele je křeslo vybaveno odnímatelným omyvatelným polstrovaným sedákem.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 110 kg (viz produktový štítek).

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.

**Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).**

## **OBSAH BALENÍ**

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám s opěrnými nohama, opěrkou zad a područkami, polstrovaný sedák a plastovou hygienickou nádobu ACC/5H.

## **MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU**

Pro použití křesla sundejte polstrovaný sedák a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod hygienickým prkénkem dozadu. S vyjmutou nádobou lze křeslo také použít nad běžnou toaletní mísou.

## **ÚDRŽBA**

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.