



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 3504

Výrobek: Proutěné toaletní křeslo



Zobrazený model: 3504

SPECIFIKACE

Celková hloubka: 47 cm

Celková šířka: 60 cm

Celková výška: 79 cm

Hloubka sedu: 46 cm

Šířka sedu: 43 cm

Výška sedu: 46 cm

Hmotnost výrobku: 7 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg

POPIS

Robustní toaletní křeslo s košíkem, s odnímatelným sedákem a pohodlnou zádovou opěrkou. Pod ním je skrytý nočník s rukojetí a víkem.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Používá se jako stacionární toaletní křeslo a židle se snadno odnímatelným toaletním příslušenstvím.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte do vhodné místnosti a pozice pro potřeby klienta.

Chcete-li použít jako toaletní křeslo, vyjměte čalouněný sedák. Při sezení a stání používejte loketní opěrky.

Chcete-li odebrat nočník, vyjměte polstrované sedadlo a zvedněte nočník za rukojeť.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu.

Nikdy na křesle nestůjte.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

