

Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)**Kód výrobku:** 3505**Výrobek:** Dřevěné toaletní křeslo Royal

Zobrazený model: 3505

SPECIFIKACE

Celková hloubka: 48 cm

Celková šířka: 61 cm

Celková výška: 87 cm

Hloubka sedu: 49 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 49 cm

Hmotnost výrobku: 15 kg

Max. hmotnost uživatele:
160 kg**POPIS**

Robustní dřevěné toaletní křeslo s odnímatelným sedákem a pohodlnou zádyšovou opěrkou. Pod ním je skrytý nočník s rukojetí a víkem.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Používá se jako stacionární toaletní křeslo a židle se snadno odnímatelným toaletním příslušenstvím.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte do vhodné místnosti a pozice pro potřeby klienta.

Chcete-li použít jako toaletní křeslo, vyjměte čalouněný sedák potažením dozadu. Při sezení a stání používejte loketní opěrky.

Chcete-li odebrat nočník, vyjměte polstrované sedadlo a zvedněte nočník za rukojeť.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu.

Nikdy na křesle nestůjte.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.ukEmail: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Pokud máte s tímto zařízením problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

