



## Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4550, 4551 & 4553 včetně variant

**Výrobek:** Sprchové křeslo



### SPECIFIKACE

Maximální hmotnost uživatele pro všechny verze (kromě verzí /HD): 140kg

Maximální hmotnost uživatele pro /HD verze: 195 kg

Hmotnost výrobku: 5-7 kg



Zobrazený model: 4550/4BC/FR

Celková hloubka (opěrky nohou na minimum): 56 cm

Celková hloubka (opěrky nohou na maximum): 76 cm

Celková šířka: 56 cm

Celková výška: 83 cm

Hloubka sedu: 41 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 46 cm

### POPIS

Plastové potažené ocelové sprchové křeslo s mušlovým sedákem, které umožňuje uživateli sedět pohodlně při sprchování. Dodává se v řadě variant. Gumové kroužky na nohách, pokud jsou ve výbavě, sníží klouzání a nezanechávají skvrny na podlaze sprchy.

Verze /4BC mají čtyři brzděná kolečka, která umožňují snadný pohyb dovnitř a ven ze sprchového koutu.

/FR verze jsou vybaveny opěrkou nohou k odpočinku nohou, pokud uživatel sedí na křesle.

Verze EX a /ADJ mají teleskopické/nastavitelné nohy, které umožňují změnu výšky sedu na výšku odpovídající uživateli.

/HD verze jsou verze s vyšší nosností, které pojmu hmotnost až 195 kg.

Verze DA a model 4551 mají odnímatelné područky, které umožňují snadné boční přesuny uživatele.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Umožní uživateli pohodlně a bezpečně sedět při sprchování.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Přesuňte výrobek do sprchy, pokud již není trvale umístěn uvnitř. Posadte uživatele na sedák a proveďte běžnou hygienu.

Pokud chcete zabrzdit křesla vybavená brzděnými kolečky, stačí stlačit velké zadní jazýčky na kolečkách dolů. Pro uvolnění brzd zatlačte dolů malé plastové jazýčky na každém kolečku.

Na křeslech vybavených nastavitelnými nohami je lze nastavovat individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru podkovy, posunete teleskopický nástavec do nové polohy a následně vložíte sponu zpět.

Na křeslech vybavených odnímatelnými područkami je snadno odstranit jemným tahem nahoru, dokud se područky neuvolní.

Na křeslech vybavených opěrkou nohou jednoduše zasuňte opěrku nohou dovnitř nebo ven do příslušné polohy.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 4551/4BC

Celková hloubka: 60 cm  
Celková šířka: 57 cm  
Celková výška: 88 cm  
Hloubka sedu: 41 cm  
Šířka sedu: 46 cm  
Výška sedu: 51 cm



Zobrazený model: 4553EX

Celková hloubka: 62 cm  
Celková šířka: 55 cm  
Celková výška: 76-91 cm  
Hloubka sedu: 41 cm  
Šířka sedu: 47 cm  
Výška sedu: 40-55 cm

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Používejte pouze na rovných površích.  
Zajistěte, aby tam, kde se používají zátky na pohlavní orgány, byly tyto na svém místě.  
Tento výrobek nebo opěrky nohou (pokud jsou ve výbavě) není vhodné stavět nebo ponořovat do bazénů atd. Pokud dojde k poškození objímek, přestaňte křeslo používat a vyhledejte náhradu.  
Pojízdná křesla nejsou určena k použití jako invalidní vozík. Jsou navržena tak, aby umožnila přesun osob dovnitř/ ven ze sprchového koutu jako mobilní pomoc na míru. Vždy se ujistěte, že jsou kolečka (pokud jsou k dispozici) zablokována a že vám uživatel při přemístění ven nebo na židli pomáhá. Kolečka udržujte vždy bez nečistot, jako jsou vlasy atd., které mohou na kolečkách ulpívat.  
Pokud je křeslo vybaveno nastavitelnými nohama, ujistěte se, že byly všechny nohy nastaveny na stejnou výšku.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.  
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

