



## Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4237, 4238(P) & 4239(G)

**Výrobek:** Nástěnné sprchové sedačky



### SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4237

Hloubka sedu: 38 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 48-56 cm

Hmotnost výrobku: 5 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg



Zobrazený model: 4238 & 4238P

Hloubka sedu: 37 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 48-56 cm

Hmotnost výrobku: 3,5 kg

Maximální hmotnost uživatele: 160 kg

### POPIS

Trvale osazená sedačka do sprchy (s nebo bez polstrováním), kterou lze sklopit ke zdi, když ji nepoužíváte. Volitelně nastavitelné opěrné nohy jsou k dispozici tak, aby vyhovovaly různým výškám uživatelů.

4237, 4238 (P) a 4239 mají sedátka na klip, který umožňuje snadné vyjmutí pro čištění.

4239G má pevné sedátko a sedátko s otvorem, které umožňuje snadnější koupání.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Umožní uživateli pohodlně a bezpečně sedět při sprchování.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Tato pomůcka musí být připevněna na nosnou zeď. Montáž provede způsobilá osoba. Upevnění proveďte pomocí hmoždinek. Nemůžeme doporučit, jaké upevnění na zdi použít, protože to bude záviset na konstrukci vaší zdi, vyžádejte si radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.

Před upevněním sedačky ke zdi je zapotřebí nohy upravit na danou výšku. Po montáži musí být nohy ve svislé poloze. Nohy lze nastavit individuálně odšroubováním závitové nohy a zajištěním ve správné poloze utažením matice.

Chcete-li sedačku sklopit, zatáhněte za horní hranu sedátka dolů a potom spusťte obě loketní opěrky. Nohy se automaticky složí směrem ven do správné polohy. Po použití zvedněte sedátko zpět do svislé polohy a výrobek se sám zastaví na správném místě.

***NESKLÁDEJTE sedátko tahem za nohy, protože by to poškodilo spojovací tyč z nerezové oceli a nohu samotnou. Pokud se nebudete řídit tímto návodem, dojde k zneplatnění záruky.***

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 4239 & 4239G

Celková hloubka: 54 cm

Celková šířka: 62 cm

Celková výška: 90-98 cm

4239:

Hloubka sedu: 30 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 48-56 cm

Hmotnost výrobku: 5 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg

4239G:

Hloubka sedu: 38 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 48-56 cm

Hmotnost výrobku: 6 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na sedačce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na pomůcce nestůjte! Ujistěte se, že je uživatel oprávněn používat výrobek. Při použití buďte opatrní, protože některé koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

