

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC

575 B, B/DELUXE



CE

POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS

Nástavec je vyroben z odolného plastu. Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento plastový nástavec ve spodní části vybaven dvěma vymešovými patkami, které fixují polohu nástavce proti posunutí. K nastavení bočních vymešovacích patek slouží jistící šrouby. Model 575 B/Deluxe je navíc vybaven poklopem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 190 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 160 kg.


Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části nástavce, tj. nástavec a aretační šrouby s patkami.

PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Nasadte nástavec na mísu tak, aby byl v co nejtěsnějším kontaktu s mísou a držáky (A) dotáhněte boční vymešovací patky (B), tak aby se nástavec nemohl posunout.

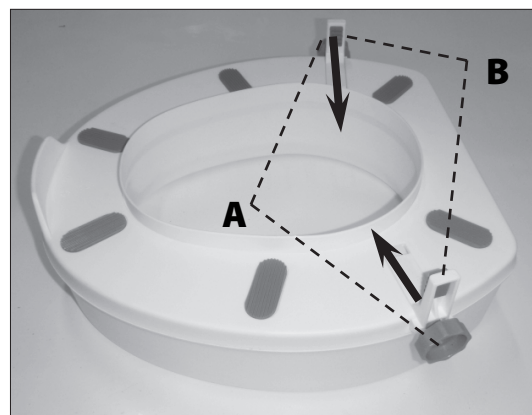

ÚDRŽBA

Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min - 85 °C).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.