

Toaletní nástavec RFM

Návod k použití

Toaletní nástavec RFM[®] s víkem (06087195) nebo bez víka (06087203), výška 10 cm

Toaletní nástavec RFM s bočními nastavitelnými šrouby zvyšuje sedák vaší toalety o 10 cm. Toaletní nástavec RFM[®] slouží pro ulehčení při sedání nebo vstávání z toalety, ale také při samotném používání toalety. Ulehčuje starším lidem, lidem s postižením nebo s omezením pohybu denní používání toalety. Lehký sklon povrchu pomáhá optimálnímu držení při sezení a redukuje ohnutí kyčlí a kolenních kloubů. Toaletní nástavec RFM[®] má vpředu i vzadu hygienický výřez a zvyšuje tím komfort. Díky jednotně hladkému povrchu a kvalitnímu zpracování se výrobek jednoduše čistí a nemá problémová místa, kde by se mohly držet špína a zbytky. Nástavec je z polypropylenu a je proto velmi odolný a stabilní. Toaletní nástavec je možné umístit na většinu běžných toaletních mís a je dostupný s víkem nebo bez víka. Pro vyčištění je možné toaletní nástavec RFM[®] celý ponořit do vody. Je sterilovatelný při 85°C/1 minutu, celková hmotnost bez víka: 0,81 kg, celková hmotnost s víkem: 1,20 kg, maximální zatížení 200 kg.

Dva boční nastavitelné šrouby zajišťují optimální oporu vašeho toaletního nástavce RFM[®] a garantují tímto způsobem jistotu sedání a vstávání. Nastavitelné šrouby jsou vyrobeny z nylonu, jsou odolné a stabilní. Ergonomický tvar umožňuje samotným uživatelům s artrózou nebo jinými nemocemi kloubů v oblasti rukou bezpečně a snadně zajištění nebo uvolnění nástavce.


Návod k instalaci:

- Nasadte dva nastavitelné šrouby tvaru L následovně:
- Položte toaletní nástavec na sedací plochu dolu na rovnou podložku a nasadte nastavitelné šrouby do určených otvorů. Posunujte šrouby opatrně v otvoru dál a otáčejte šrouby ve směru hodinových ručiček, až se zachytí závit.
- Umístěte nastavitelné šrouby tak, aby zůstala mezera k okraji toalety.
- Zvedněte toaletní nástavec a umístěte ho šrouby dozadu přímo na toaletu. Prodloužení nástavce vpředu musí být doraženo vpředu na toaletní mísu.
- Otáčejte nastavitelnými šrouby ve směru hodinových ručiček, až ucítíte mírný odpor a toaletní nástavec bude zajištěn proti pohybu.
- **Pozor:** Nastavitelné šrouby byly vyvinuty pro lehké otáčení / připevnění. Neotáčejte tedy dále, pokud cítíte odpor, který napovídá, že jsou šrouby upevněny.
- Ujistěte se ještě před použitím toaletního nástavce, že se toaletní nástavec nepohybuje.

Čištění:

- Toaletní nástavec je nutné čistit a dezinfikovat denně. Před tím, než toaletní nástavec použije další osoba, je bezpodmínečně nutné ho důkladně vyčistit a vydezinfikovat.
- Všechny díly mohou být čištěny teplou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Alternativně může být nástavec **bez nastavitelných šroubů** ponořen do vody a / nebo sterilován 1 minutu při 85°C.
- Nepoužívejte rozpouštědla, ostré předměty nebo vysokotlaké a parní čističe.

Upozornění:

- Nepřekračujte maximální zatížení: 200 kg. 
- Před použitím se vždy ujistěte, že je toaletní nástavec bezpečně zajištěn.
- Nepřidržujte se toaletního nástavce při sedání nebo vstávání.



Pozor: Neutahujte šrouby příliš!

Technická data:

Rozměry: ca. 41 x 37 cm
Výška: 10 cm
Otvor: ca. 26 x 20 cm
Maximální zatížení: 200 kg

Výrobce:

Rehaforum Medical GmbH
Daimlerstr. 12 a
D-25337 Elmshorn
www.rehaforum.com

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel. +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz