

Úplná technická specifikace:

| PARAMETR: | Model AR-102 | Model AR-103 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka sedáku: | 42cm | 45cm |
| Hloubka sedáku: | 45cm | 42cm |
| Šířka mezi loketními opěrkami: | 47cm | 45cm |
| Hloubka s krytem otvoru sedáku: | 45cm | 45cm |
| Výška sedáku od podlahy: | 45 – 55cm | 42,5 – 57,5cm |
| Vnější celkové rozměry: | š. 50cm x hl. 62cm x v. 85cm | š. 60cm x hl. 54cm x v. max. 96cm |
| Šířka po složení: | 14cm | nevztahuje se |
| Objem sanitární nádoby: | 4 litry | 5 litrů |
| Hmotnost: | 7,2kg | 7kg |
| Maximální hmotnost uživatele: | 120kg | 120kg |

ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Trinec Kinská, čp. 601, PSČ: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu, natržení čalouněných prvků), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, plastových opěrek rukou a čalouněných prvků.
- 4) Záruka zaniká při jakémkoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 5) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Datum vytvoření návodu: 30.12.2019

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz

 **Výrobce:**
ARMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 011 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

 **ARMmedical**[®]
HomeCare Line

NÁVOD K POUŽITÍ

TOALETNÍ KŘESLO POLSTROVANÉ

Model: AR-102 SKLÁDACÍ

Model: AR-103



AR-102



AR-103







NÁVOD K POUŽITÍ – TOALETNÍ KŘESLO POLSTROVANÉ

Vážený zákazníku,
děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovejte prosím tuto příručku, která je zároveň záručním listem.

Účel použití:

Toaletní křeslo je určeno pro osoby se zdravotním postižením a poruchami pohybového ústrojí, jakož i pro starší osoby a také ty, které mají problémy s používáním standardní toaletní mísy. Uspodňuje a pomáhá při každodenních toaletních činnostech, umožňuje uspokojit fyziologické potřeby bez nutnosti vstávat z křesla. Čalouněné toaletní křeslo je určeno především pro osoby citlivé na tlak, nepohodlí při používání standardní toaletní židle, pro lidi, kteří ocení pohodlí a vysokou úroveň hygieny. Zejména se doporučuje po poraněních kyčle. Měkké sedadlo a zádová opěrka poskytují mimořádné pohodlí.

Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání toaletního křesla – **120 kg**

Varování a doporučení:

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny trubky rovné, bez poškození (např. během přepravy).
- 2) Kontrolu, zda všechny konstrukční prvky nemají žádné poškození, např. praskliny, lomy.
- 3) Kontrolu, zda jsou všechny nohy toaletní židle nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Kontrolu, zda jsou na všech nohách gumové násadce a zda jsou všechny správně upevněné.
- 5) Nerozkládání toaletní židle na místech, kde může být kluzká podlaha (rozlitá kapalina, led).



Abyste předešli zranění:

- 1) Toaletní křeslo musí být zcela rozloženo – týká se AR-102 (nohy židle musí být zcela roztažené, zcela rozložené). Křeslo musí vypadat jako na obrázku.
- 2) Před použitím je nutné vždy zkontrolovat technický stav a stabilitu produktu (kontrola všech upevňovacích prvků, sedáku, trubek rámu, pryžových násadců).
- 3) Všechny nohy toaletního křesla musí být nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu, který zabraňuje pohybu židle při sezení.
- 5) Dbejte zvláštní opatnosti při použití na mokřím nebo kluzkém povrchu.
- 6) Je zakázáno razantního sedání na židli (např. naskakování).
- 7) Je zakázáno přenášet židli s uživatelem.
- 8) Je zakázáno stávání na loketní opěrky, sedadlo a jakoukoli část výrobku.
- 9) Toaletní křeslo nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
- 10) Toaletní křeslo může být používáno pouze k účelu, který je určen v této příručce. Použití pro jiné účely může mít za následek nehodu, zranění nebo jiné následky pro uživatele nebo třetí strany. Výrobce neodpovídá za využívání a používání toaletní židle pro jiné účely, než které jsou popsány v této příručce.

Pokyny k údržbě:

Čalouněné toaletní křeslo by mělo být pravidelně čištěno pouze vodou a jemnými čistícími prostředky (omyvatelný povrch). Poté důkladně osušte jemným hadříkem. Je zakázáno používat silné čistící prostředky, benzín a rozpouštědla. Skladování v místnostech s vysokou vlhkostí (např. sklep), v kombinaci s nedostatečnou pečlivou údržbou produktu (hygienou) povede ke ztrátě funkčních a estetických parametrů židle a tím ke ztrátě záruky. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky!

Mějme na paměti! Výrobek je toaletní křeslo, proto by se měla přísně dodržovat hygienická pravidla.

Odstraňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat toaletní křeslo svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!**
Může to způsobit nehodu.

Toaletní křeslo je nestabilní.

- a) Jsou všechny nohy křesla ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Mají všechny nohy gumové násadce (7)? Pokud ne, nasadte je.
- c) Jsou všechny gumové násadce (7) správně nasazeny? Pokud ne, nasuňte / nasadte je správně.
- d) Je židle zcela rozložena (pro AR-102)? Pokud ne, rozložte je správně. Roztáhněte přední a zadní nohy (dokud nejsou zcela roztažené).
- e) Je sedadlo (2) pevně opřeno o všechny hrany na rámu (5) židle (pro AR-103)? Pokud ne, umístěte jej správně na rám.
- f) Jsou všechny prvky rámu vzájemně pevně spojeny? Pokud ne, kontaktujte prodejce. **TOALETNÍ KŘESLO NEPOUŽÍVEJTE !!!**

POPIS



- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Polstrovaná zádová opěrka | 4. Loketní opěrky | 7. Gumové násadce |
| 2. Polstrovaný sedák | 5. Rám | 8. Klipy k nastavení výšky |
| 3. Polstrovaný kryt toaletního otvoru | 6. Nádoba | 9. Nohy s nastavením výšky |

Příprava k použití

- 1) Vyjměte toaletní křeslo z kartonu nebo z fóliového obalu.
- 2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení**.
- 3) Uchopte opěradlo (1) a sedadlo (2) oběma rukama a rozložte židli, dokud nepocítíte odpor (pro AR-102) - po rozložení musí vypadat jako na obrázku. Zasuňte sanitární nádobu (6) pod sedadlo (2) - zepředu (pro AR-102). Toaletní křeslo AR-103 nevyžaduje rozložení rámu. Po vyjmutí sedadla (2) (pro AR-103) vložte sanitární nádobu (6) do držáků pod sedadlem. Sedadlo (2) se položí na rámovou konstrukci (5) toaletního křesla (pro AR-103).
- 4) Nasuňte nohy a upravte výšku nohou (9) toaletního křesla podle výšky uživatele. Za tímto účelem vytáhněte klip (8) pro nastavení výšky umístěný v noze, čímž se uvolní zámek. Nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím nohy. Západkový kolík musí zapadnout do otvoru v požadované výšce! Zkontrolujte, zda západka nastavení výšky (8) „zaklapla“ do správného otvoru. Opakujte pro všechny nohy. **UPOZORNĚNÍ!** Všechny čtyři nohy (9) toaletní židle musí být nastaveny na stejnou výšku.
Loketní opěrky (4) přišroubujte k rámu křesla (5).

Ukončení používání:

1. Pro AR-102 - vyjměte (vysuňte) sanitární nádobu (6). Uchopte křeslo oběma rukama za sedadlo (2) a zádovou opěrku (1) a složte toaletní křeslo. Zvedejte sedadlo dozadu směrem k zádové opěrce, až bude židle zcela sklopená. U AR-103 vyjměte sanitární nádobu (6) a polstrovaný sedák (3) nasadte na otvor na rámu.

Čištění a skladování:

Umístěte toaletní křeslo na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození, vlhkosti, mrazu, slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům. Skladujte při pokojové teplotě.

V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU

