

Akupresurní podložka Qmed – sada s polštářkem

Stimulační body akupunktury těla posiluje funkci orgánů v těle a stimuluje sekreci přírodních endorfinů, které mají účinek analgezie. Pokud trpíte bolestmi zad, ischias, bolestí krku, svalovým napětím, svalovými křečemi, špatnou cirkulací, trávicími problémy, artritidou, nespavostí, bolestmi hlavy, únavou nebo stresem, akupresurní podložka Qmed uvolní a osvěží vaše tělo, zmírní bolest bez dalšího léčení.

Kanály toku energie a nervové cévy jsou velmi důležité pro krevní oběh a pro udržení normálních fyziologických funkcí lidského těla. Proto se stává tělo náchylnější k nemocem, když dojde k poruše kanálů a nervových cév.

Akupresurní sada Qmed může stimulovat akupresurní body a nervy k posílení tělesného odporu a ke snížení vlivu patogenních faktorů. Klinickými zkušenostmi a experimenty je prokázáno, že akupunktura může upravit pohyb střev, sekreci trávicí žlázy, tok žluči, diastolickou a kontrakční funkci střevních a žlučových cest.

Pokyny pro použití sady:

Prvních pár minut používání výrobku můžete cítit jako trochu bolestivé, ale relativně rychle se bolest mění v pocit pohody a relaxace. Pokud jste mimořádně citliví, je dobré mít na začátek tenký hadřík mezi vámi a podložkou - například tričko. Zhluboka se nadechněte, uvolněte se a užívejte si. Začněte terapii přibližně 5 minut dlouhými intervaly. Jak si na to vaše tělo zvykne, můžete prodloužit na 40 minut denně. Chcete-li získat nejlepší výsledek, používejte pomůcku denně.

Doporučení:

Před použitím pomůcky doporučujeme seznámit se s principy akupresury. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme poradit se o používání s lékařem.

Upozornění!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Údržba:

Rozpusťte v teplé vodě malé množství čistícího prostředku a podložku pečlivě omyjte rukou. Po několikerém opláchnutí nechejte podložku vysušit při pokojové teplotě. Dávejte pozor na bodce, abyste se vyhnuli zranění. Podložku ani polštářek nečistěte v pračce ani nesušte v sušičce!

Materiál:

Obal: 100 % čistá bavlna, výrobek: 100 % PU pěna

Velikost:

Univerzální

Sada obsahuje:

Akupresurní podložka + polštářek + vak

Označení výrobku:

DRQN3A0NAXSET

Výrobce:

mdh sp.z o.o.
Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Polsko
www.qmedplus.pl



Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz