

# NÁVOD K POUŽITÍ

## ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO S VYSKOU OPOROU

# 203 A



CE

## **POUŽITÍ**

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

## **POPIS**

Odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn výškově nastavitelnou polstrovanou podpůrnou deskou s ergonomickými nastavitelnými rukojeťmi, čtyřmi plnými otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení desky je zajištěno pomocí dvou V-pojistek s možností aretace.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka je určeno k nácvičku vertikalizace a chůze. Používejte vždy s doprovodem!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 140 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 130 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů.

Při vstávání, opírání nebo posazování na chodítka vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

## **OBSAH BALENÍ**

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka se čtyřmi kolečky, podpůrnou deskou s nastavitelnými madly, dvěma šrouby k jejich zajištění a nohy s pojistkou k zajištění nastavení výšky madel.

## **ÚDRŽBA**

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**NASTAVENÍ VÝŠKY PODPŮRNÉ DESKY**

Zmáčkněte aretační „V-pojistku“ (A) a tahem nastavte požadovanou výšku podpůrné desky a pojistku uvolněte. Stejný postup opakujte na druhé straně. Před použitím zkontrolujte, zda je deska ve vodorovné poloze a pojistky správně zaklaplé. Nastavování výšky je potřeba dělat postupně a střídavě na obou stranách.

**NASTAVENÍ POLOHY MADEL**

Povolte oba aretační šrouby (B), nastavte požadovanou polohu madel a šrouby opět dotáhněte.



Nastavení výšky desky a délky madel