



NÁVOD K POUŽITÍ

Kolenní ortéza GENU Medical IMS

Datum poslední revize: 06/2017

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte zmíněné rady a doporučení. V případě dotazů se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo prodejcem.

Ortéza je zdravotnický prostředek ve shodě se směrnicí 93/42/EHS.

Popis produktu

Kolenní ortéza GENU Medical IMS je vyrobena z materiálu, který je příjemný na dotek. Výztuha je umístěna nad a pod kolenem se suchými zipy a znehybňuje tak koleno v pozici ohybu 0°. Velikost lze nastavit přemístěním bočních postranních částí. Výztuha je dostupná ve dvou velikostech.

Provedení je vhodné pro pravou i levou končetinu.

Bezpečnostní pokyny

První nasazení ortézy může provést jedině odborný personál k tomu vyškolený. Zásadně je při nastavování upínacích pásek potřeba dbát na to, aby nebyly utažené příliš pevně, aby tak nedošlo k zamezení průtoku krve aj.

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, dostaví se otok nebo kožní potíže, konzultujte použití se svým lékařem.

Indikace

Ortéza se používá pro pooperační fixaci kolenního kloubu, při poraněních kolenních vazů a čéšky.

O vhodnosti použití se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Použití

1. Pro usnadnění nasazení rozepněte všechny suché zipy.
2. Upevněte přední postranní díly tak, aby čéška byla zcela volná a konce postranních dílů bylo možno překrýt a zafixovat.
3. Upevněte suché zipy v pořadí odshora dolů.
4. Upravte případně polohu ortézy tak, aby dobře padla a neškrtila.



Kontraindikace

Stavy, které vyžadují úplné znehybnění. Výrazné deformace kostí. V případě následujících stavů je třeba ortézu používat pouze po dohodě s lékařem: kožní změny nebo záněty v místě použití ortézy, zjizvení, přecitlivělost k vývinu tepla, křečové žíly, poruchy prokrvování nohou, lymfatické poruchy.

Další informace

- Ortéza by měla být nošena pod pravidelným dohledem fyzioterapeuta vždy dle zdravotního stavu.
- Ortéza je určena výhradně pro jednoho uživatele.
- V případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vše konzultujte s lékařem.
- Kombinace ortézy s jinými pomůckami musí být schválena lékařem předem.
- Nedodržování správné osobní hygieny a použití nevhodného čisticího prostředku může způsobit oděrky nebo jiná onemocnění kůže spojená mimo jiné se zvýšeným pocením a množením mikroorganismů. Nepoužívejte ortézu spolu s hřejivými gely a mastmi. Mějte na paměti, že špatně vyčištěná ortéza může způsobit podráždění kůže a poškodit materiál, ze kterého je ortéza vyrobena.

Podmínky pro skladování

Ortému skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte ortému přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.

Čištění

Ortému čistěte vlhkým hadříkem za použití šetrného prostředku. Ortému neperte v pračce, nesušte v sušičce ani ji nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidlo nebo jiné chemické čištění.

Technické parametry

Velikost	Provedení	Délka (cm)	Kód produktu
0	dětská	40	27 120 10
1	krátká	48	27 120 11
2	dlouhá	58	27 120 12

Materiál: polyester, froté, pěna PU

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel. (prodejna): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
E-mail: meyra@meyra.cz