

#### Úplná technická specifikace:

PARAMETR:	Model AR-007
Rám (materiál):	duralový
Barva rámu:	stříbrná
Typ rámu:	skládací
Celková šířka:	62cm
Výška sedáku od podlahy:	56cm
Výškové nastavení rukojetí:	81-94cm
Šířka po složení (bez nádoby)	15cm
Hmotnost produktu:	7kg
Maximální hmotnost uživatele:	136kg

**AR**medical®  
HomeCare Line

## NÁVOD K POUŽITÍ

### CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ DYNAMIC – SKLÁDACÍ

Model: AR-007

#### ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, [reklamace@distrimed.cz](mailto:reklamace@distrimed.cz). Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Třinec Kinská, čp. 601, PSČ: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu, poškrábání plastových dílů), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, koleček, plastových opěrek rukou apod.
- 4) Záruka zaniká při jakémkoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 5) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Datum vytvoření návodu: 8.6.2020

**Výrobce:**  
**ARMEDICAL** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska  
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 011 111  
[www.armedical.pl](http://www.armedical.pl), e-mail: [biuro@armedical.pl](mailto:biuro@armedical.pl)

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, [info@distrimed.cz](mailto:info@distrimed.cz),  
[www.distrimed.cz](http://www.distrimed.cz)





## NÁVOD K POUŽITÍ – CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ DYNAMIC – SKLÁDACÍ

**Vážený zákazníku,**  
*děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovejte prosím tuto příručku.*

### Účel použití:

Rehabilitační podpora je pomocné a rehabilitační zařízení určené pro osoby se zdravotním postižením s pohybovými poruchami, problémy se vstáváním nebo problémy s udržováním rovnováhy při chůzi. Používá se také k udržení rovnováhy při učení se chodit po nemoci nebo zranění.

### Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání chodítka – **136 kg**

Maximální přípustné zatížení košíku/tašky na nákupy – **5 kg**



### Varování a doporučení:

**Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:**

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny prvky rámu rovné, bez poškození (např. během přepravy).
- 2) Kontrolu, zda jsou obě držadla (1) ve stejné výšce.
- 3) Kontrolu, zda jsou obě držadla/rukojeti (1) pevně připojené k rámu tak, aby se zabránilo jejich vyjmutí.
- 4) Kontrolu, zda chodítko obsahuje všechna čtyři kola (5) a (8).
- 5) Kontrolu, zda jsou kola bezpečně přišroubována (5) a (8)
- 6) Kontrolu, zda jsou všechny prvky nosného rámu pevně spojeny (7)
- 7) Kontrolu, zda je podpora zcela rozložena
- 5) Nerozkládejte chodítko na místech, kde může být kluzká podlaha (rozlitá kapalina, led).



### Abyste předešli zranění:

- 1) Chodítko musí být zcela rozloženo (po rozložení musí vypadat přesně jako na obrázku).
- 2) Před použitím je nutné zkontrolovat stabilitu chodítka.
- 3) Rukojeti (držadla) (1) musí být nastavena ve stejné výšce.
- 4) Chodítko používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu. Nepoužívejte na schodech!
- 5) Buďte zvláště opatrní na mokřích, kluzkých površích.
- 6) Při pohybu buďte obzvláště opatrní na ležící koberečky, oděvy, hračky atd., a také ležící zvířata, nerovné, povrchy s prasklinami, nerovné chodníky, obrubníky atd.
- 7) Chodítko musí být vždy drženo oběma rukama! Ruce pevně svírají držadla (1), s možností rychlého zatáhnutí za rukojeti brzdy (2).
- 8) Chodítko nesmí být vystaveno dlouhodobým extrémním povětrnostním podmínkám (např. velmi silný mráz nebo přímé silné sluneční záření).
- 9) Chodítko nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení povolené výrobcem.
- 10) Nesmí být překročeno maximální přípustné zatížení košíku / tašky (3)
11. Před použitím se poraďte s lékařem.

### Pokyny k údržbě:

Pravidelně čistěte hadříkem navlhčeným vodou s jemným čistícím prostředkem. Poté důkladně vysušte měkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky!  
 Gumová kola (5) (8) jsou součástí podléhající opotřebení a v případě nadměrného opotřebení je nutné je vyměnit za nové.

### Odstraňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat chodítko svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!** Může to způsobit nehodu.

### Chodítko je nestabilní.

- a) Jsou obě držadla/rukojeti (1) ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Jsou obě držadla/rukojeti (1) pevně spojené s rámem? Pokud ne, zabezpečte je.
- c) Je chodítko plně rozšířeno? Pokud ne, rozložte jej a zkontrolujte jeho stabilitu.
- d) Jsou všechna kola (5) a (8) pevně dotažena? Pokud ne, dobře je utáhněte.
- e) Jsou všechny prvky rámu (7) vzájemně pevně spojeny? Pokud ne, kontaktujte místo nákupu. CHODÍTKO NEPOUŽÍVEJTE!!!

### POPIS

1. Držadla / rukojeti
2. Rukojeť brzdy s parkovací funkcí
3. Taška na nákupy
4. Sedák
5. Kola s brzdou
6. Blokovací západky
7. Rám
8. Kola v otočných vidlicích
9. Opěrka



### Příprava k použití

- 1) Vyjměte chodítko z kartonu nebo z fóliového obalu.
- 2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení**.
- 3) Držadla (1) vložte do otvorů v rámu (6).
- 4) Upravte výšku držadel podle výšky uživatele. Za tímto účelem zatlačte na blokovací západku (6) pro nastavení výšky umístěnou v rámu (7), nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím držadel a nechte západkový kolík zapadnout do otvoru v požadované výšce! Opakujte pro obě rukojeti. **UPOZORNĚNÍ!** Rukojeti (1) musí být nastaveny na stejnou výšku.
- 5) Po rozložení je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnou funkci brzd. Položte ruce na držadla (1), prsty zatáhněte rukojeti brzd (2) směrem nahoru (směrem k držadlu) a zkontrolujte, zda přítlačné bloky blokují brzděná kola (5). Pro kontrolu brzdění v parkovací poloze zatáhněte větší silou rukojeti brzdy (2) směrem dolů (směrem od držadla), až zaklapne západka. Brzda by měla být v parkovací poloze - poté lehkým zatlačením chodítka dopředu zkontrolujte, zda jsou kola zablokována.
- 6) Připevněte tašku (3).

**Ohledně vhodnosti používání chodítka s ohledem na zdravotní stav uživatele, se případně poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.**

### Ukončení používání:

Chodítko složíte zatáhnutím za úchyt na sedáku směrem nahoru a následným stažením levé a pravé části chodítka směrem k sobě.

### Čištění a skladování:

Umístěte toaletní křeslo na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození, vlhkosti, mrazu, slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům. Skladujte při pokojové teplotě.

V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

**DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU**

