

**MEYRA<sup>®</sup>**  
*medical*

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



**KRČNÍ ORTÉZA COLLAR STARK**

**KATALOGOVÉ ČÍSLO MQA2D**

**CE**

## Indikace:

Poruchy stability krční páteře po traumatických zlomeninách, vyvrtnutí a patologických zlomeninách v průběhu léčby zánětu nebo rakoviny. Nutnost omezení volného pohybu krční páteře během zlomenin obratlů. Syndromy bolesti různé etiologie.

## Kontraindikace:

Nestabilní zlomeniny a neurologické poruchy. Klinické stavy, které vyžadují omezení bočního ohýbání.

## Výběr a nasazení:

Pro správnou imobilizaci a pohodlí pacienta je důležité správné nasazení límce, stejně tak jako volba správné velikosti. Dvoudílný design se skládá z předního a zadního dílu, které jsou zabaleny jako sada.

Měření výšky a obvodu:

Změřte svislou vzdálenost od horní části ramene pacienta ke špičce brady. Změřená velikost odpovídá potřebné výšce límce. Pokud změřená velikost spadá mezi dvě po sobě jdoucí velikosti, vyzkoušejte nejprve menší velikost.

Změřte obvod krku pacienta. Změřená velikost odpovídá potřebnému obvodu límce.

1. Poté, co jste vybrali správnou velikost límce, jej můžete nasadit - začněte zadní částí límce na zadní část krku pacienta. Vyrovnajte límec. Zadní šipka by měla směřovat nahoru.
2. Přiložte přední část límce k přední části krku, pod bradu. Vyrovnajte límec, abyste zajistili neutrální polohu. Přední část překrývá zadní část, aby byla zajištěna účinná imobilizace a pohodlí. Přední šipka by měla směřovat nahoru.
3. Pomocí suchých zipů a oboustranného nastavení utáhněte límec. Tím zajistíte neutrální polohu krční oblasti pacienta.

## Údržba:

Prát ručně ve velmi jemných pracích prostředcích při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat, neprát v pračce, před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla, v rozloženém stavu.

## POZOR!



Tento výrobek je určen k individuálnímu použití každého pacienta. Pokud během používání výrobku pocítíte nepohodlí, pozorujete otok nebo podráždění pokožky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Správný výběr límce je velmi důležitý pro znehybnění krku pacienta a pohodlí při používání. Hlava pacienta musí být vždy v neutrální poloze.

## POZOR!



Konečné rozhodnutí o použití a výběru pomůcky musí učinit váš lékař nebo odborník.

**Velikost:**

Velikost	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S1	S2	S3	S4
M (33-40)	M1	M2	M3	M4
L (40-48)	L1	L2	L3	L4
XL (48 & víc)	XL1	XL2	XL3	XL4





**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)