

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



KYČELNÍ ORTÉZA

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQ10B

CE

Ortéza účinně pomáhá rehabilitaci a léčbě v případě poranění, nemocí a dysfunkce kyčelního kloubu. Řídí rozsah pohybu, zajišťuje kompresi měkkých tkání.

Indikace:

Pooperační komprese po transtrochanterických zlomeninách. Pooperační komprese po intertrochanterické osteotomii a náhradě kyčle. Poranění související s nadměrným přetížením kyčelního kloubu, degenerace kyčelního kloubu. Různé syndromy bolesti.

Kontraindikace:

Podmínky, které vyžadují imobilizaci nebo omezení úhlového rozsahu pohybu. Špatný krevní oběh v končetině.

Popis výrobku:

Ortéza se skládá z elastického pásku, který drží boky, a stehenního pásku z polyamidové pleteniny a lykry se zapínáním na suchý zip. Mezi pásky je bederní vycpávka. Podložka je vyrobena z polyuretanové pěny lemované velurovými látkami. Přídavná pevná podložka z polyetylenové fólie zajišťuje optimální stabilizaci kyčle.

Jak ortézu nasadit:

Před prvním použitím byste se měli poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem, abyste ortézu správně nastavili (stlačení, stabilizace - ortéza může být použita s tuhou podložkou nebo bez ní). Při prvním nasazení ortézy by vám měl pomoci kvalifikovaný zdravotnický personál. Vždy vyberte správnou velikost ortézy. V případě potřeby připevněte tuhou podložku k vnitřní straně stehenní podložky. Upevněte stehenní pásek. Aby byla zajištěna optimální stabilizace, pásky by měly být dobře připevněny, ale měly by umožňovat volný krevní oběh v končetině.

Velikost

Velikost	S)	M	L	XL
Obvod stehna (cm)	75,0-90,0	90,0-105,0	105,0-120,0	120,0-140,0

Závěrečné rozhodnutí o aplikaci a výběru pomůcky by měl učinit zdravotnický odborník.

Ochrana a údržba:

Hygiena produktu je důležitá pro rehabilitaci pacienta. Ortézu je třeba mýt ručně, jemnými čistícími prostředky (max. 35 °C). Nechlórovat. Nepoužívat silné chemické čistící prostředky a bělidla. Nesušit v sušičce. Před sušením jemně vyždímat. Sušit v horizontální poloze. Sušit mimo umělé zdroje tepla. Nežehlit.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte prosím gely nebo hřejivou mast. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.

POZOR!



Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.





**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz