

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO S VYSOKOU OPOROU

203 B



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Odlehčený skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn výškově nastavitelnou polstrovanou podpůrnou deskou s ergonomickými nastavitelnými rukojeťmi, bovdenovými brzdami s možností aretace, a čtyřmi plnými otočnými kolečky. Snadné výškové nastavení desky je zajištěno pomocí dvou V-pojistek s aretací.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka je určeno k nácvičku vertikalizace a chůze. Používejte vždy s doprovodem!

Před prvním použitím si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů.

Při vstávání nebo opírání se o chodítka vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. skládací rám chodítka se čtyřmi kolečky, podpůrnou deskou s osmi šrouby, maticemi a podložkami k jejímu připevnění, nastavitelná madla s bovdenovými brzdami, dvěma šrouby k jejich zajištění.

ÚDRŽBA

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

1. Vyjměte rám s kolečky z krabice a roztažením přední i zadní části od sebe a zatlačením podpůrné tyče rámu směrem dolů rám rozložte.
2. Pomocí přiložených šroubů, podložek a matic upevněte podpůrnou desku k rámu.
3. Zmáčkněte aretační „V-pojistku“ a tlakem/tahem nastavte požadovanou výšku podpůrné desky a pojistku uvolněte. Stejný postup opakujte na druhé straně. Před použitím zkontrolujte, zda je deska ve vodorovné poloze a pojistky správně zaklaplé. Nastavování výšky je potřeba dělat postupně a střídavě na obou stranách.
4. Zasuňte přiložená madla do otvorů na přední straně podpůrné desky, nastavte jejich požadovanou délku a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou rukojetí. Šrouby pečlivě dotáhněte. Bovdenová lanka by měla vést vně rámu i madel.

Při skládání chodítka postupujte opačným postupem.



BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy směrem k sobě by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačení páky brzdy směrem od sebe, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Používejte obě brzdy!

Kolečka by se měla volně otáčet, nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřidte brzdy pomocí šroubů bovdenového lanka.