

Návod k použití

MEYRA®

Madlo na vanu 4290

8092247



Madlo na vanu 4290 nabízí při vstupu do vany a výstupu z vany bezpečnou oporu. Instalace je možná na většinu standardních typů van.

Instalace

1. Přiložte madlo na požadované místo přes okraj vany tak, aby se oblast madla, kde jsou dva přítlačné šrouby, nacházela na vnější straně vany.
2. Vyrovnajte madlo do svislé polohy.
3. Nejdříve našroubujte přítlačný šroub ve vnitřní oblasti vany tak, aby závit nevyčnival. Nebezpečí poranění!
4. Všechny tři přítlačné šrouby bezpečně zajistěte.

Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že podpůrné prvky a vana jsou čisté, tedy bez zbytků mýdla nebo sprchového šamponu. Nebezpečí sklouznutí!
- Před každým použitím zkontrolujte pevnost uchycení madla.
- Nevystavujte tahovému ani podélnému zatížení.

Péče a údržba

- Na čištění používejte běžné neabrazivní čisticí prostředky.

I přes stabilní konstrukci a použití odolných materiálů podléhá madlo určitému opotřebení. **Proto je doporučeno madlo nechat každých 6 měsíců zkontrolovat odborníkem. Zde je zapotřebí dát pozor především na pevnost šroubového a upínacího připevnění.**

Technické údaje

| | |
|-----------------|-----------|
| Šířka rukojeti: | 13 cm |
| Šířka svorky: | 7 – 12 cm |
| Nosnost: | 100 kg |
| Barva: | bílá |



Tento výrobek odpovídá směrnici EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

VÝROBCE

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Germany
info@meyra.de
www.meyra.de

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
meyra@meyra.cz
www.meyra.cz