

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO

103, 249 A



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi, čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Chodítka je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, odnímatelnou opěrkou zad, polstrovaným sedátkem a nákupní taškou. Model 249 A má navíc rozšířený sed pro bariatrické pacienty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při vstávání, opírání nebo posazování na chodítka vždy zaaretujte brzdy.

Při chůzi s chodítkem mějte ruce vždy připravené na pákách brzd.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte chodítka k sezení.

Chodítka není určeno pro transport a převoz sedících uživatelů.


OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly, 4 kolečka, bovdenové brzdy, nákupní tašku, sedátko, opěrkou zad a 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

Rám chodítka vyjměte z krabice a roztažením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Zasuňte vidlici s kolečkem do otvorů **(A)**, až pojistka **(B)** zaklapne. Tento postup opakujte u všech čtyř koleček. Přiložená madla zasuňte do otvorů **(C)**, nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou rukojetí **(1)**. Šrouby pečlivě dotáhněte. Bovdenová lanka by měla vést zevně rámu i madel. Opěrkou zad zasuňte do otvorů **(D)** zmáčknutím pojistek **(2)**. Nyní je chodítka připraveno k použití.


Při skládání chodítka nadzdvihněte sedátko a tahem nahoru za madlo **(E)** umístěném na dně tašky rám složte.

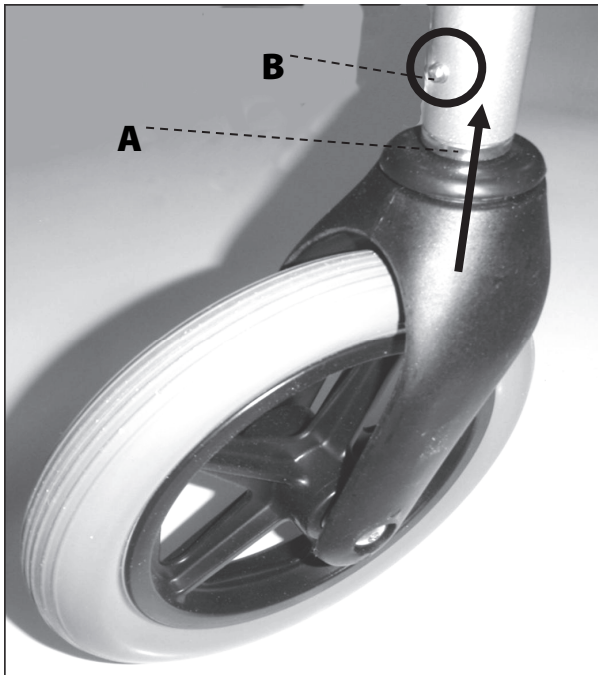


Instalace vidlic s kolečky.



Madla zasuněte do otvorů C, opěrku zad do otvorů D.

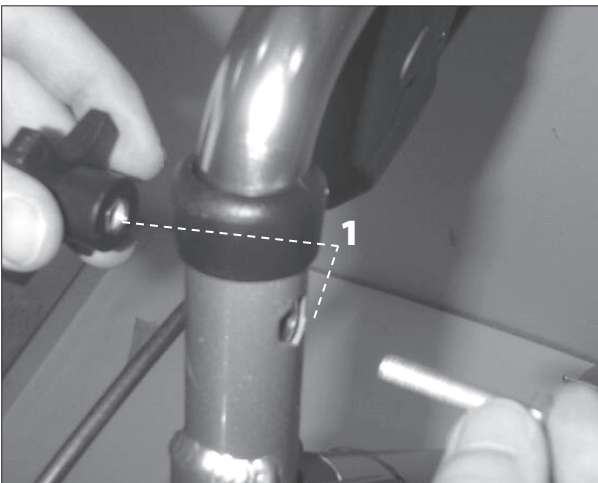

Madla upevněte pomocí šroubu a matice.

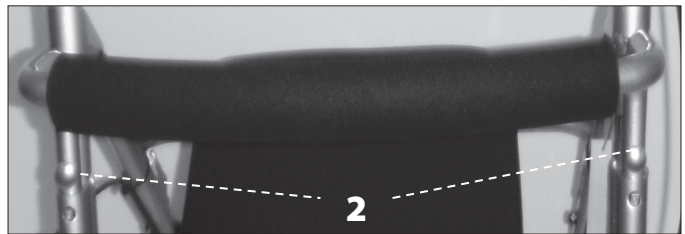

Zamáčkněte pojistky na opěrce.



Madlo uvnitř tašky



Složené chodítko

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.